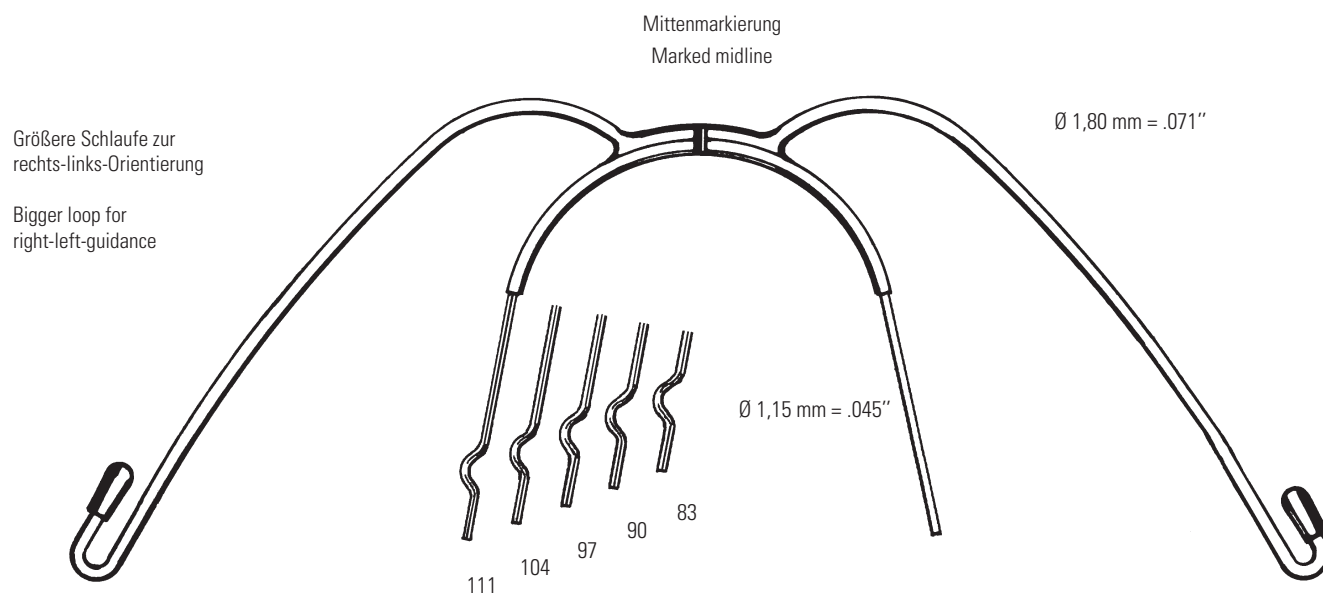
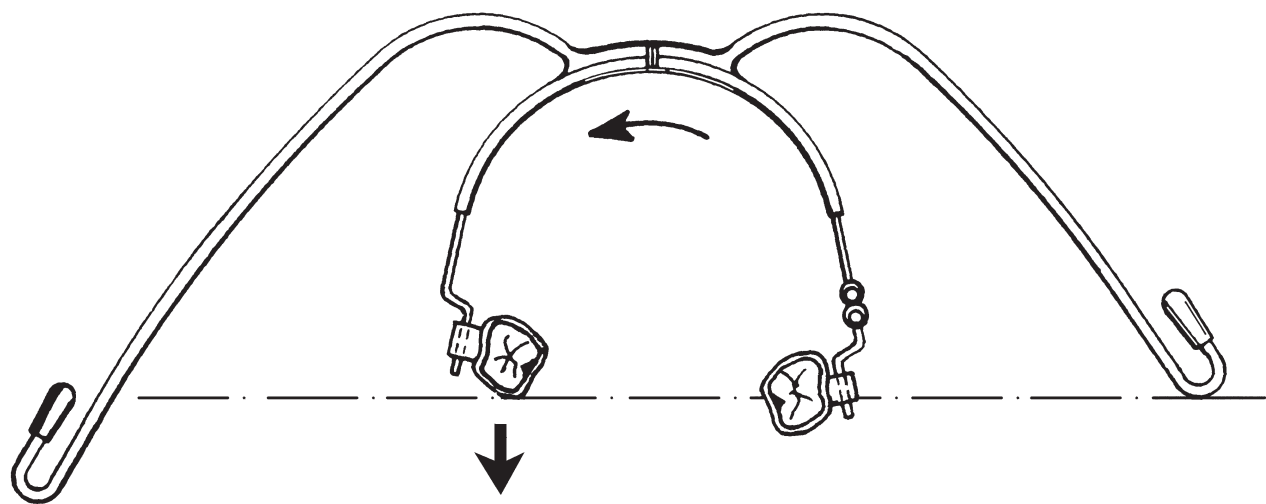


Laser-Facebow



ohne Eckzahnhaken without cuspid hooks	mit Eckzahnhaken with cuspid hooks	Plastikschutzkappe plastic cap	Innenbogen inner arch	Beschreibung description
€€	€€			
601-1020	601-2020		STANDARD-SERIE	
601-3021	-		83 mm	Standard-Serie mit Stoppschlaufen Standard-Series with stop-loops
601-3022	-		90 mm	
601-3023	-		97 mm	
601-3024	-		104 mm	
601-3025	-		111 mm	
601-1320	-		MINI-SERIE	
601-3322	-		90 mm	Mini-Serie mit Stoppschlaufen Mini-Series with stop-loops
601-3323	-		97 mm	
601-3324	-		104 mm	

Facebow-Gelenk und Aktivator-Röhrchen* Facebow-hinge and activator-tube*



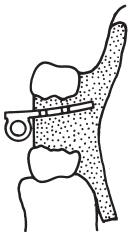
Wirkungsweise des asymmetrischen Facebows

Das Gelenk wird auf der nicht zu distalisierenden Seite im Facebow eingebaut, der Außenarm wird bis auf die Höhe der 6-Jahr-Molaren verkürzt. Auf der Seite der stärkeren Distalisation muß der Außenarm lang belassen werden. Der stärker zu distalisierende Molar wird nach distal rotiert und in transversaler Richtung kann eine Bewegung nach palatinal auftreten.

Function and construction of the asymmetrical facebow

The hinge is fitted to the inner bow of the side not to be distalized and the outer bow on this side is shortened to the position in line with the first molar. The outer bow of the side to be distalized remains in the original length. It should be remembered that during distal movement the molar could rotate in a palatal direction.

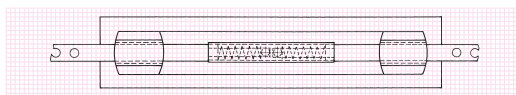
615-0003		1	Facebow-Gelenk für den asymmetrischen Facebow Facebow-hinge for the asymmetrical Facebow	
€ €				

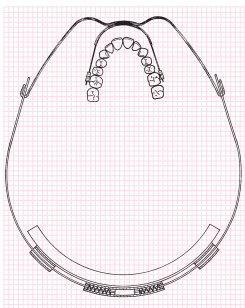
Order No.	Type	ø mm	ø inch	Stück pieces	Beschreibung description	
760-0060		1,15	.045	10	Aktivator-Röhrchen Activator tube	
€ €						
760-0061		1,15	.045	10		
€ €						

*acc to Prof. Sander

Bio-Low-Cervical-Pull

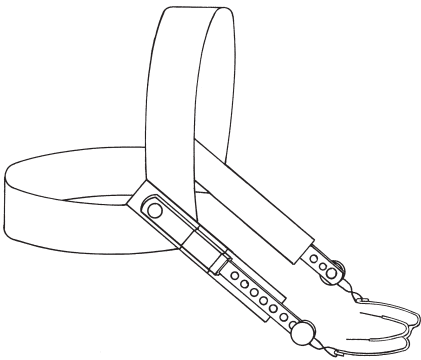
	Beschreibung description
	Elastische Federn im asymmetrisch ausgleichenden Gleitnackenband integriert, liefern eine gleichmäßige, kontinuierliche Krafteinwirkung auf die zu distalisierenden Molaren. Elastic springs incorporated into the low cervical pull allow equal asymmetrical continuous forces onto the molars to be distalised.
	Die Sicherungsanschlüsse verhindern Verletzungen. The safety stops prevent injuries.



Order No.		Farbe colour	Inhalt contents
603-0106 CE		blue blue	Kompletter Satz, bestehend aus: Nackenpolster, Zugband, Kupplungsknopf und -feder, Facebow 601-1020 Set consisting of: Foam pad, traction band, coupling button, coupling spring, facebow 601-1020
603-0104 CE		blau blue	Kompletter Satz ohne Facebow Complete set without facebow
611-1013 CE			10 Kupplungsknöpfe und 10 Kuplungsfedern 10 coupling buttons and 10 coupling springs
611-1010 CE			10 Kuplungsfedern 10 coupling springs

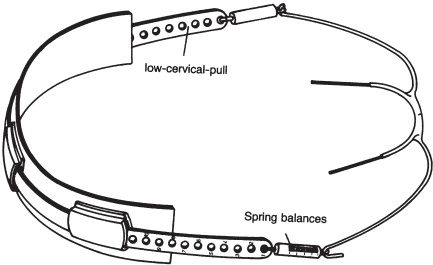
Bio-High-Pull

	Beschreibung description Durch die Verwendung modernster Federn wird eine kontinuierliche Kraft von ca. 450 g pro Feder ausgeübt, was die Behandlung verkürzt und den Patientenkomfort erhöht. Through the use of most modern springs a continuous force of about 450 g per spring is exerted and thus reduces treatment time and improves patient comfort.
---	--

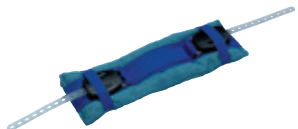
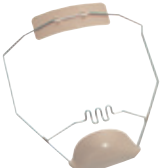
Order No.		Inhalt contents
606-0240 €€		Kompletter Satz, bestehend aus: High-Pull mit Federzug, 2 Kupplungsknöpfen, 2 Kupplungsfedern, Facebow 601-1320 Set consisting of: High-Pull with traction springs, 2 coupling buttons, 2 coupling springs and facebow 601-1320
611-0240 €€		Kompletter Satz ohne Facebow Complete set without facebow
611-1013 €€		10 Kupplungsknöpfe und 10 Kupplungsfedern 10 coupling buttons and 10 coupling springs
611-1010 €€		10 Kupplungsfedern 10 coupling springs

Low-Cervical Pull*

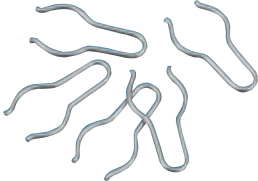
	Beschreibung description Präzisions-Facebow – Asymmetrie- und Kraftausgleich durch das Gleitnackenband Precision-Facebow – Asymmetries and power are equalized by the sliding cervical band.
---	---

Order No.		contents Inhalt
603-0103 C€	 low-cervical-pull Spring balances	Satz bestehend aus: 1 Gleitnackenband, 1 Facebow mit Federwaagen und Mobil-Stop Set containing: 1 low-cervical-pull, 1 facebow with spring balances and Mobil-Stop
611-0001 C€		Gleitnackenband Low-Cervical-Pull
603-5020 C€		Face-Bow vorbereitet für Federwaagen Face-bow prepared for spring balances
611-1001 C€		1 pair of spring balances 1 Paar Federwaagen
611-1013 C€		10 Kupplungsknöpfe und 10 Kupplungsfedern 10 coupling buttons and 10 coupling springs
611-1010 C€		10 Kupplungsfedern 10 coupling springs

Zugbänder Traction bands

Order No.		Farbe colour	Inhalt contents	Beschreibung description	
611-0042 CE		royalblau royalblue jeans-royalblau jeans-royalblue	1	High-Pull mit Kupplung High-Pull with clutch	
613-0010 CE		blau blue	1	Nackenzugband mit Kupplung Cervical traction band with clutch	
613-0012 CE			1		
613-0009 CE			10	Kupplung lose Clutch loose	
604-0002 CE			1	Umkehr-Gesichtsbogen Reverse face crib	
614-0001 CE			1	Kopfband mit Kinnkappe - High Pull High Pull headgear with chin cap	
614-0003 CE			1	Kopfband mit Kinnkappe - Vertikal Pull Vertical Pull headgear with chin cap	

Safe-Facebow-System

Order No.		Stück pieces	Beschreibung description
606-0130 C€		1	Safe-Facebow-System komplett, bestehend aus Facebow 601-1020, Nackenpolster mit Zugband und Kupplungsfeder Safe-Facebow-System complete, consisting of facebow 601-1020, cervical traction band, coupling spring and foam pad 
611-0025 C€		1	Kompletter Satz ohne Facebow Complete set without facebow
613-0001 C€		10	Nackenpolster Foam pads for traction bands
612-0003 C€		10	Zugbänder Traction bands
611-1009 C€		5	Kupplungsfedern Coupling springs