

***Optymalny komfort -
najwyższe bezpieczeństwo***



PODŚCIELENIA

Materiał do podścielania protez zapewniający długo utrzymujący się komfort użytkowania przy maksymalnym bezpieczeństwie

Uniwersalne podścielenia



- + Podścielenie metodą bezpośrednią
- + Doskonałe dopasowanie
- + Precyzyjna obróbka
- + Długa wytrzymałość i bezpieczeństwo

SOFRELINER TOUGH M_(MEDIUM) & S_(SOFT)

Tymczasowy materiał do podścielen, zachowujący swoją miękkość przez dłuższy czas

Zastosowanie - podścielenie protez

Różne stopnie twardości według skali Shore materiałów Sofreliner Tough M i S pozwalają na wybranie właściwego materiału dla każdego przypadku. Sofreliner Tough minimalizuje dolegliwości bólowe wywołane przez ostro zakończone wyrostki zębodołowe, po zabiegach chirurgicznych i w czasie fazy wgajania po implantacji. W przypadku zniszczonych wyrostków Sofreliner Tough zapewnia dodatkowe utrzymanie protezy przy bardzo długo utrzymującej się stabilności materiału.

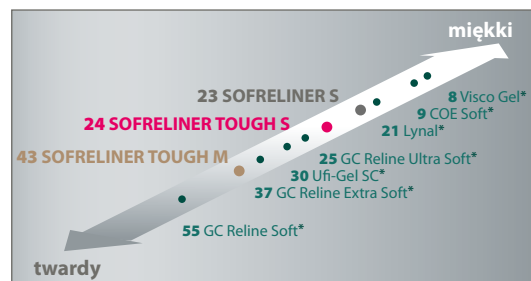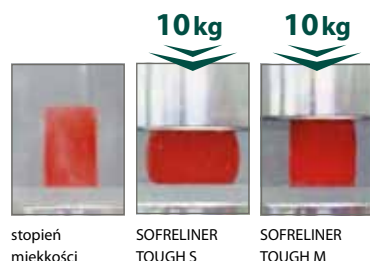

SOFRELINER TOUGH M miękki materiał do podścielen

WSKAZANIA

- + W przypadku dolegliwości bólowych wywołanych przez ostro zakończone wyrostki zębodołowe
- + W przypadku niewystarczającego utrzymania protezy spowodowanego przez znaczną atrofię wyrostków
- + W przypadku znacznych podcieni/wzniesień kości żuchwy
- + Utrzymanie protezy tymczasowej
- + Podścielenie tymczasowe lub przygotowanie tkanki

WŁAŚCIWOŚCI

- + 100% silikonu A
- + Twardość Shore 43
- + Wytrzymałość 2,5 roku
- + Znaczna wytrzymałość na zerwanie
- + Stabilność powierzchni i koloru
- + Doskonałe dopasowanie



Sofreliner Tough M to materiał do długotrwałego, stabilnego i pewnego podścielenia protez.

SOFRELINER TOUGH S bardzo miękki materiał do podścielen

WSKAZANIA

- + Tymczasowy, miękki materiał do podścielen
- + Zaopatrywanie po zabiegu chirurgicznym
- + Po fazie wgajania implantów
- + W przypadku dolegliwości bólowych wywołanych przez ostro zakończone wyrostki zębodołowe
- + W przypadku złej retencji spowodowanej przez atrofię wyrostka


WŁAŚCIWOŚCI

- + 100% silikonu A
- + Twardość Shore 24
- + Wytrzymałość 6 miesięcy
- + Stabilność powierzchni i koloru
- + Doskonałe dopasowanie



Sofreliner Tough S to materiał do krótkotrwałego podścielenia protez zwłaszcza u pacjentów szczególnie wrażliwych lub po zabiegach chirurgicznych.

Zastosowanie - precyzyjność i prostota

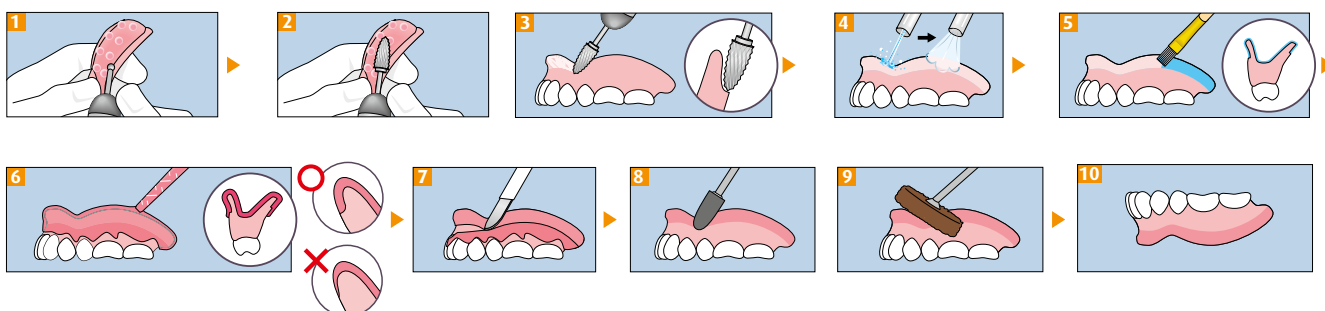

Pewna i trwała wytrzymałość


Znaczna siła przylegania materiału Sofreliner Tough zapewnia trwałe przyleganie i nie dopuszcza do odklejenia się materiału podścielającego od płyty

protezy. Test zrywania potwierdza doskonałe połączenie płyty protezy z materiałem podścielającym nawet przy obciążeniu.

Duża wytrzymałość na zrywanie

Sofreliner Tough M i S są bardzo odporne na zrywanie, dzięki czemu na materiale tym nie pojawiają się żadne rysy podczas codziennego użytkowania.


Test zrywania

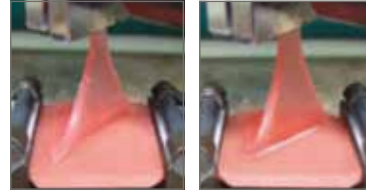

Sofreliner Tough S

Sofreliner S

Porównanie testu zrywania

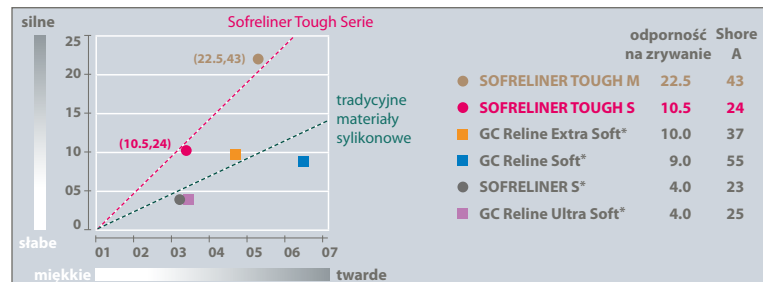

Stabilność powierzchni i koloru


Powierzchnia materiału Sofreliner Tough zachowuje przez dłuższy czas swoje właściwości. Dzięki temu podścielenie jest zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i powstawaniem nieprzyjemnego zapachu.

Poza tym Sofreliner Tough w porównaniu do innych materiałów podścielających charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na przebarwienia.



SOFRELINER TOUGH M - nienaruszone krawędzie protezy po ponad 2,5 latach.

Test stabilności powierzchni (4 tygodnie przetrzymywania w wodzie w temp. 37°C)

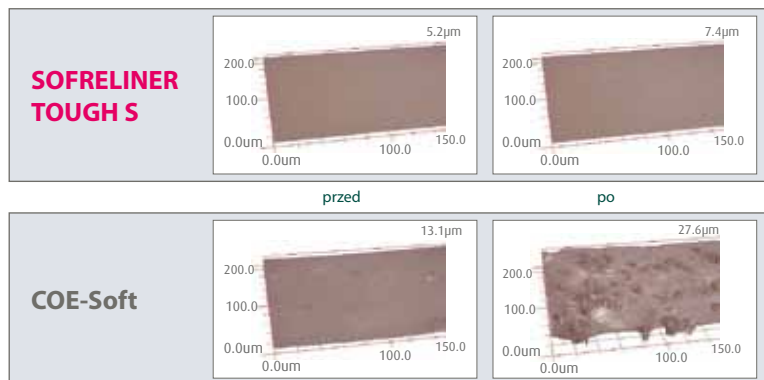


Podścielenie po ponad 2,5 latach

SILICONE REMOVER

proste usuwanie materiału podścielającego

Używając środka Silicone Remover można w prosty sposób usunąć w całości materiał Sofreliner Tough M i S, czynność ta nie wymaga zeszlifowywania. Preparat ten pozwala szybko i całkowicie usunąć materiał podścielający z płyty protezy.

Usuwanie materiału podścielającego przy pomocy Silicone Remover

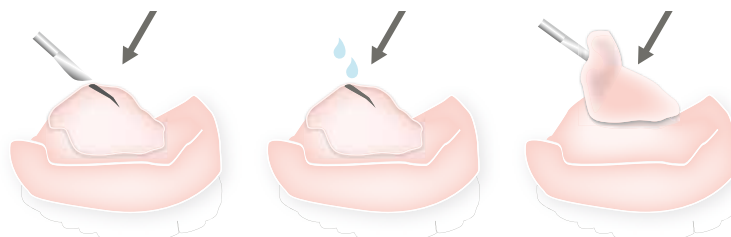

TOKUYAMA REBASE II

twrdy materiał do podścielen



Rebase II to twrdy materiał do podścielen wykorzystywany w metodzie bezpośredniej w gabinetach stomatologicznych lub pracowniach protetycznych. Rebase II twrdnieje całkowicie w jamie ustnej w ciągu pięciu minut, jest bezzapachowy i nie wytwarza ciepła. Rebase II można stosować do podścielenia zarówno protez całkowitych, jak i też częściowych.


WSKAZANIA

- + Długoczasowy, twrdy materiał do podścielen
- + Podścielenie protez całkowitych
- + Podścielenie protez częściowych
- + Po podścieleniu miękkim, gdy błona śluzowa jest już wygojona
- + Stosowany w gabinecie stomatologicznym

WŁAŚCIWOŚCI

- + Nie zawiera MMA
- + Bezzapachowy
- + Doskonale dopasowanie/ optymalny komfort użytkowania
- + Nie wytwarza zbyt dużej ilości ciepła
- + Oszczędność czasu
- + Pozwala wyeliminować koszty laboratoryjne

Standardowy czas pracy Rebase II

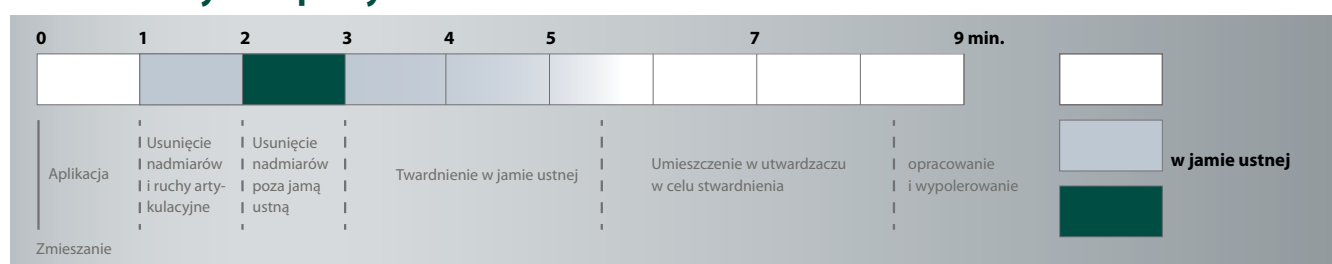

SOFRELINER TOUGH S



Zestaw Sofreliner Tough S

- Kartusz 2 x 26 g
- Primer 10 ml
- 10 x końcówki mieszające XS
- System do polerowania

REBASE II



Zestaw Tokuyama Rebase II

- Proszek 80 g
- Płyn 50 ml
- System adhezyjny 15 ml
- Utwardzacz 48 g

SOFRELINER TOUGH M



Zestaw Sofreliner Tough M

- Kartusz 2 x 27 g
- Primer 10 ml
- 10 x końcówki mieszające XS
- System do polerowania

SILICONE REMOVER



Butelka 7ml



Tokuyama Dental Deutschland GmbH
 Siemensstraße 46 | 48341 Altenberge
 Tel.: 02505 938513 | Fax: 02505 938515
www.tokuyama-dental.de | info@tokuyama-dental.de

marrodent®

Wyłączny dystrybutor w Polsce: Marrodent Sp. z o. o.
 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31
 tel. 33 810 13 28, fax 33 827 83 02
sklep@marrodent.pl | www.marrodent.pl