

VITAVM®LC flow – znakomity kompozyt licujący

Precyzyjne modelowanie. Łatwość polerowania.



VITA ustalanie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 07.17

VITA – perfect match.


VITA

Opis produktu

VITA VM LC flow to płynny, światłoutwardzalny kompozyt licujący, który stosujemy do wykonywania stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych. Dzięki ciekłej konsystencji i czynnikowi wysokiej stabilności, kompozyt można precyzyjnie nakładać oraz

modelować. Dzięki wyjątkowemu zestawieniu składników, kompozyt można łatwo polerować osiągając homogeniczną powierzchnię o wysokim połysku.

PŁYNNY I STABILNY

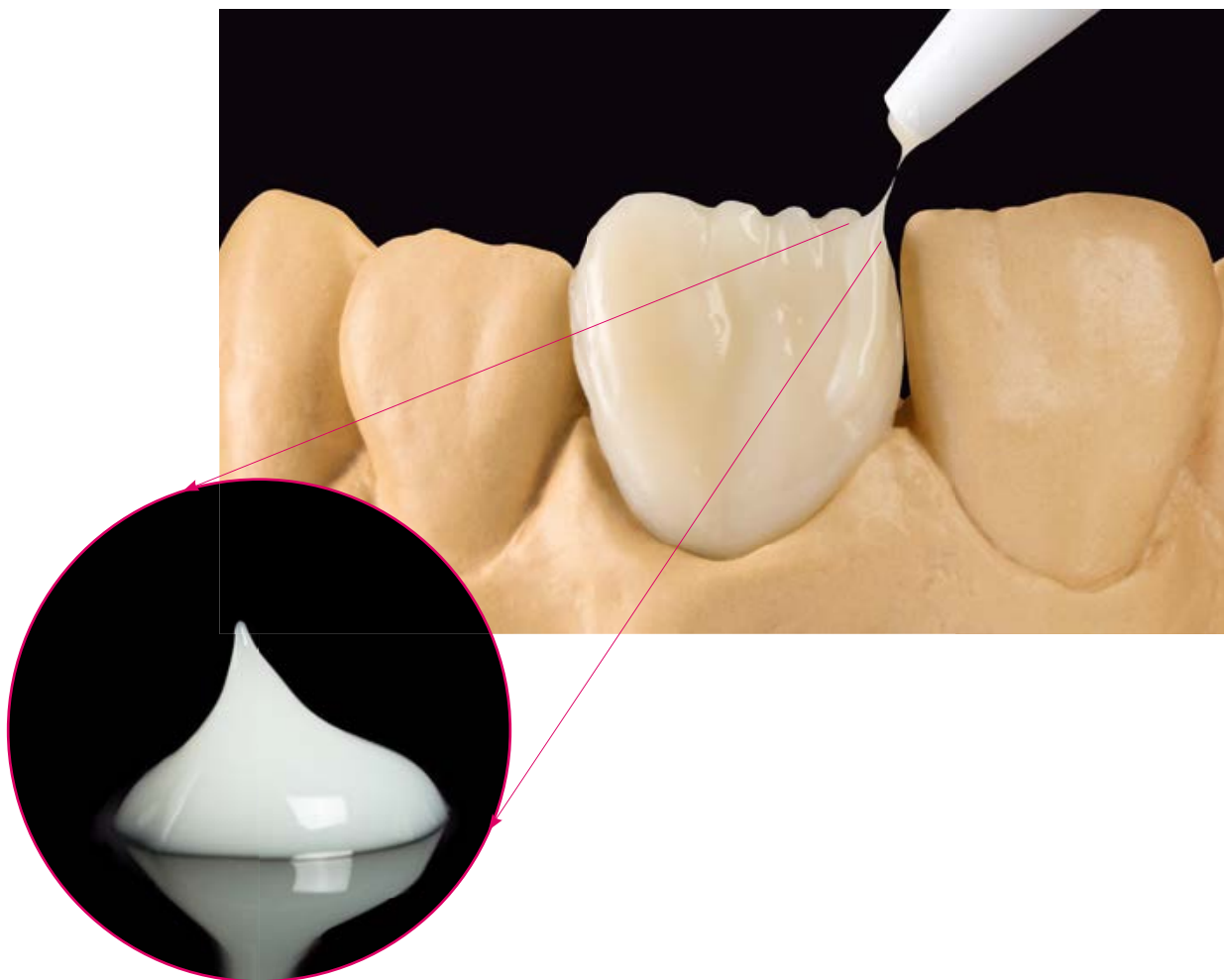

Co?

- VITA VM LC flow to płynny, światłoutwardzalny kompozyt licujący, który stosujemy do wykonywania stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych. Nowoczesne systemy licujące charakteryzują się bardzo dobrą zdolnością płynięcia oraz wysoką stabilnością.


W jakim celu?

- VITA VM LC flow nadaje się znakomicie do:
 - licowania koron, mostów, koron teleskopowych, suprakonstrukcji implantologicznych
 - indywidualizacja zębów konfekcyjnych w protezach
 - rekonstrukcja utraconych partii dziąsła

Czym?

- Główne komponenty systemu licującego VITA VM LC flow to: OPAQUE-, BASE DENTINE-, ENAMEL- oraz szeroka paleta mas uzupełniających. Kompozyt można nakładać bezpośrednio ze strzykawki, modelować pędzelkiem lub sondą.

KORZYŚCI

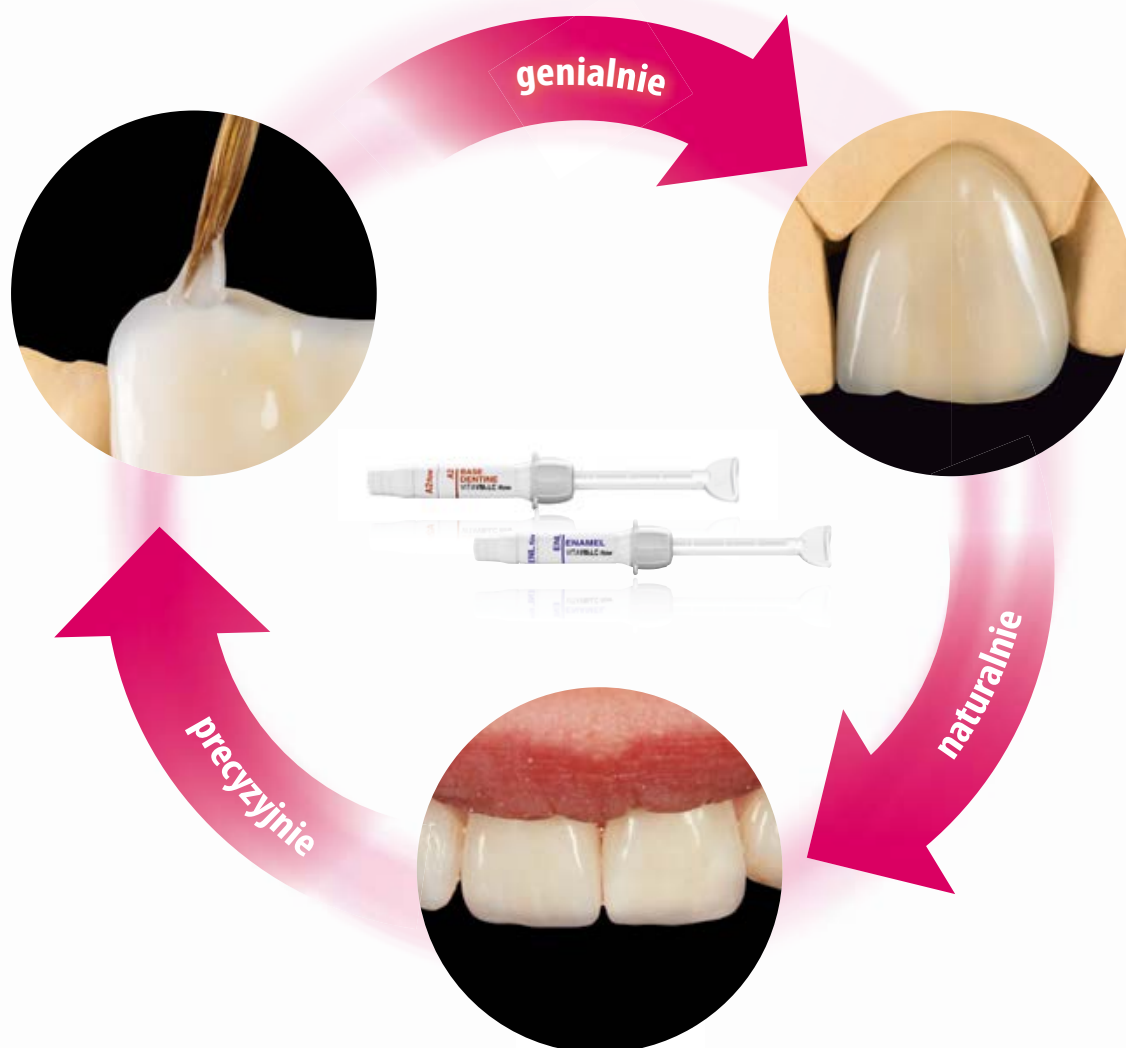

Precyzyjna

- Dzięki tiksotropowej konsystencji, możliwość precyzyjnego modelowania oraz znakomita stabilność nakładanych warstw.

Naturalny

- Żywe kolory wzorowane na naturalnym uzębieniu to czynniki wykorzystane w masach ENAMEL- i EFFECT, które charakteryzują się znakomitą przeziernością, opalescencją i fluorescencją.


Świetny

- Homogeniczna powierzchnia o wysokim połysku dzięki łatwemu czynnikowi polerowania oraz dzięki wysoce usieciowanej matrycy polimerowej z jednorodnie rozłożonymi mikrocząsteczkami wypełniaczy.

Trwały

- Dzięki bardzo dobrym właściwościom mechanicznym, wytrzymałości i odporności powierzchni, materiał umożliwia wykonywanie trwałych uzupełnień.


SYSTEM I KONCEPCJA

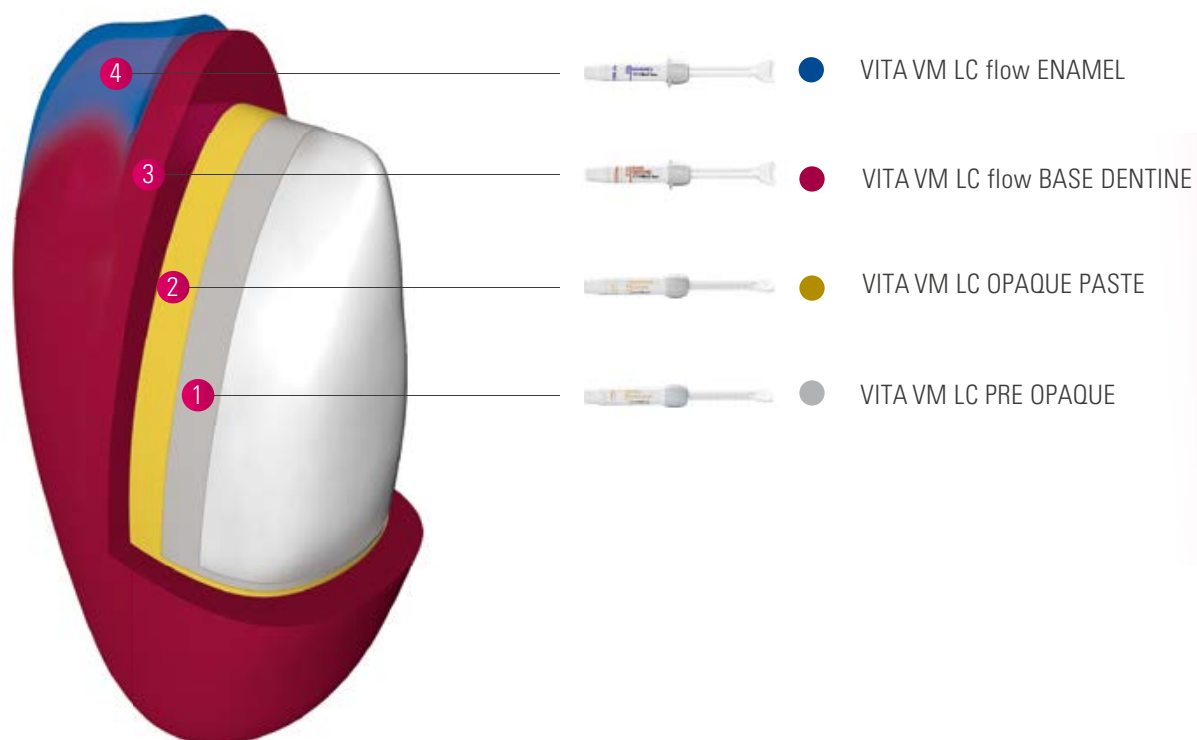

VITAVM[®]LC *flow* **SYSTEM**: komponenty podstawowe

- VITA VM LC PRE OPAQUE i masy OPAQUE PASTE do maskownia podbudów
- Masy VITA VM LC flow BASE DENTINE do obszarów szyjki i centralnej części powierzchni licowanej
- Masy VITA VM LC flow ENAMEL do wykonywania obszarów siecznych


PRZYKŁAD KLINICZNY

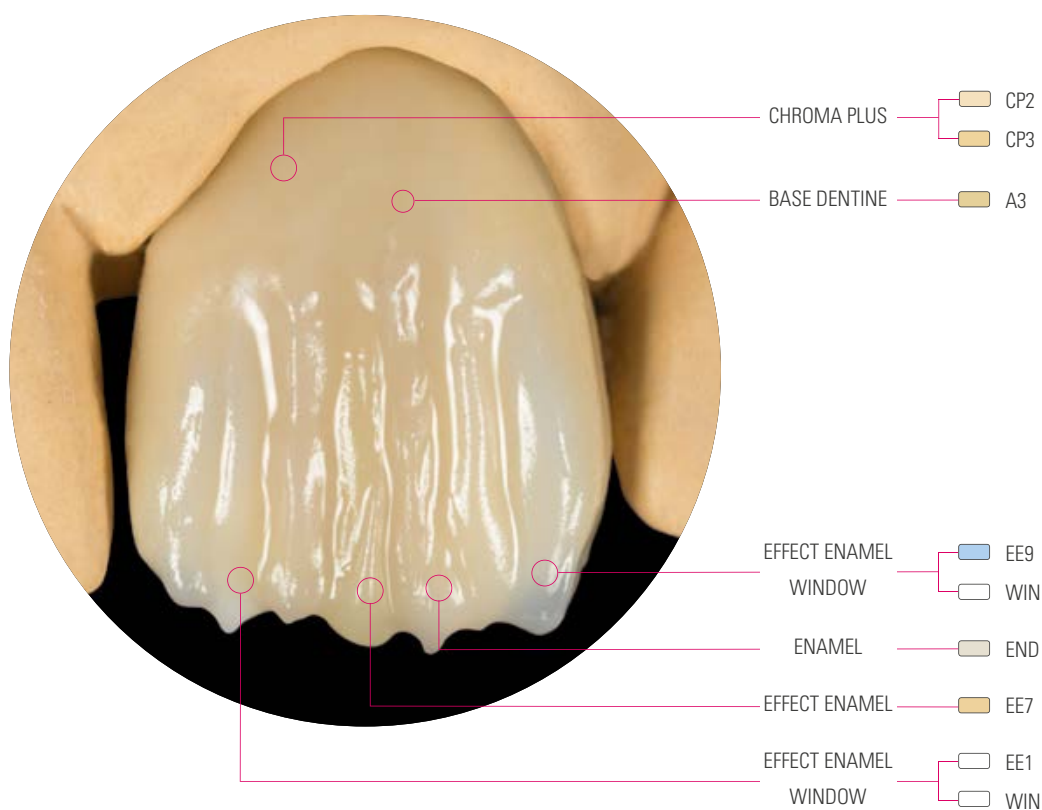

VITAVM®LC flow SYSTEM: komponenty uzupełniające


- Masy VITA VM LC flow EFFECT do zastosowania w obszarach siecznych
- Masy VITA VM LC flow CHROMA PLUS do kolorystycznej intensyfikacji obszaru szyjkowego i centralnego
- Masy VITA VM LC flow GINGIVA-Massen do rekonstrukcji utraconych partii dziąsłowych
- Farbki VITA VM LC PAINT do reprodukcji efektów kolorystycznych

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

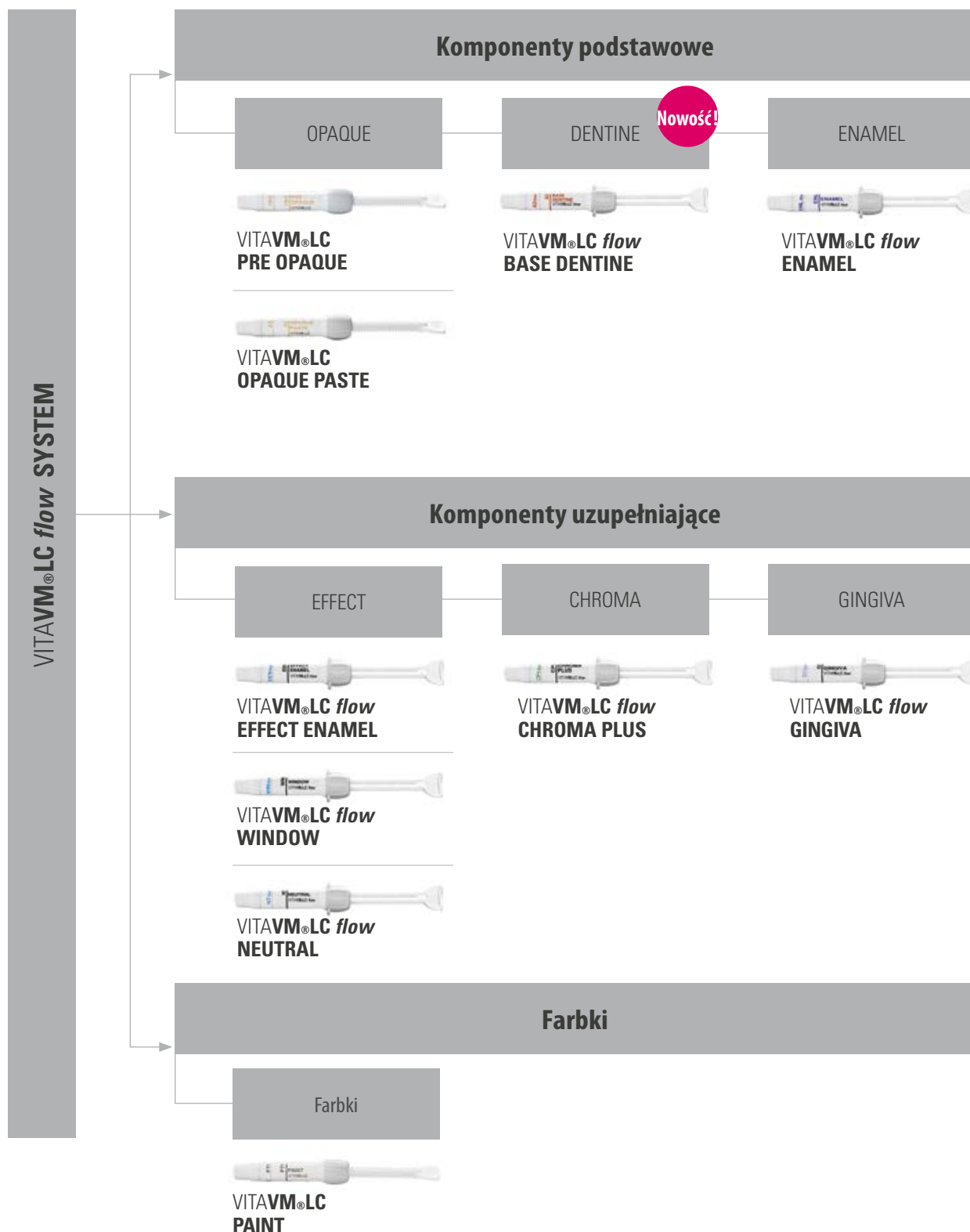


Wskazówka: VITA VM LC flow SYSTEM może być użytkowany z popularnymi polimeryzatorami oraz kompatybilnymi systemami spajającymi (Primer). Szczegółowy przegląd znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com.

DOSTĘPNE KOLORY

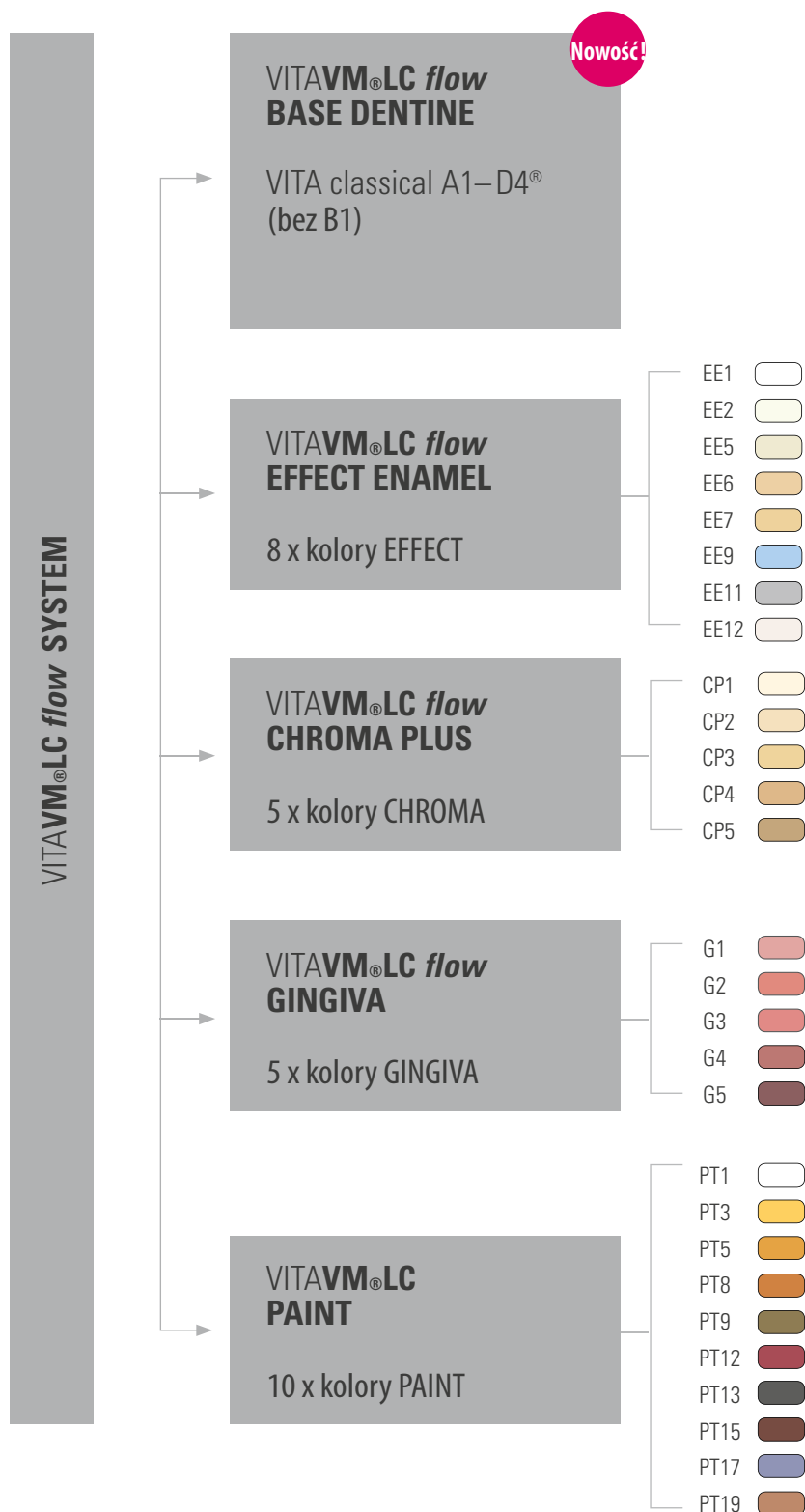

ZAKRES ZASTOSOWANIA I MATERIAŁY

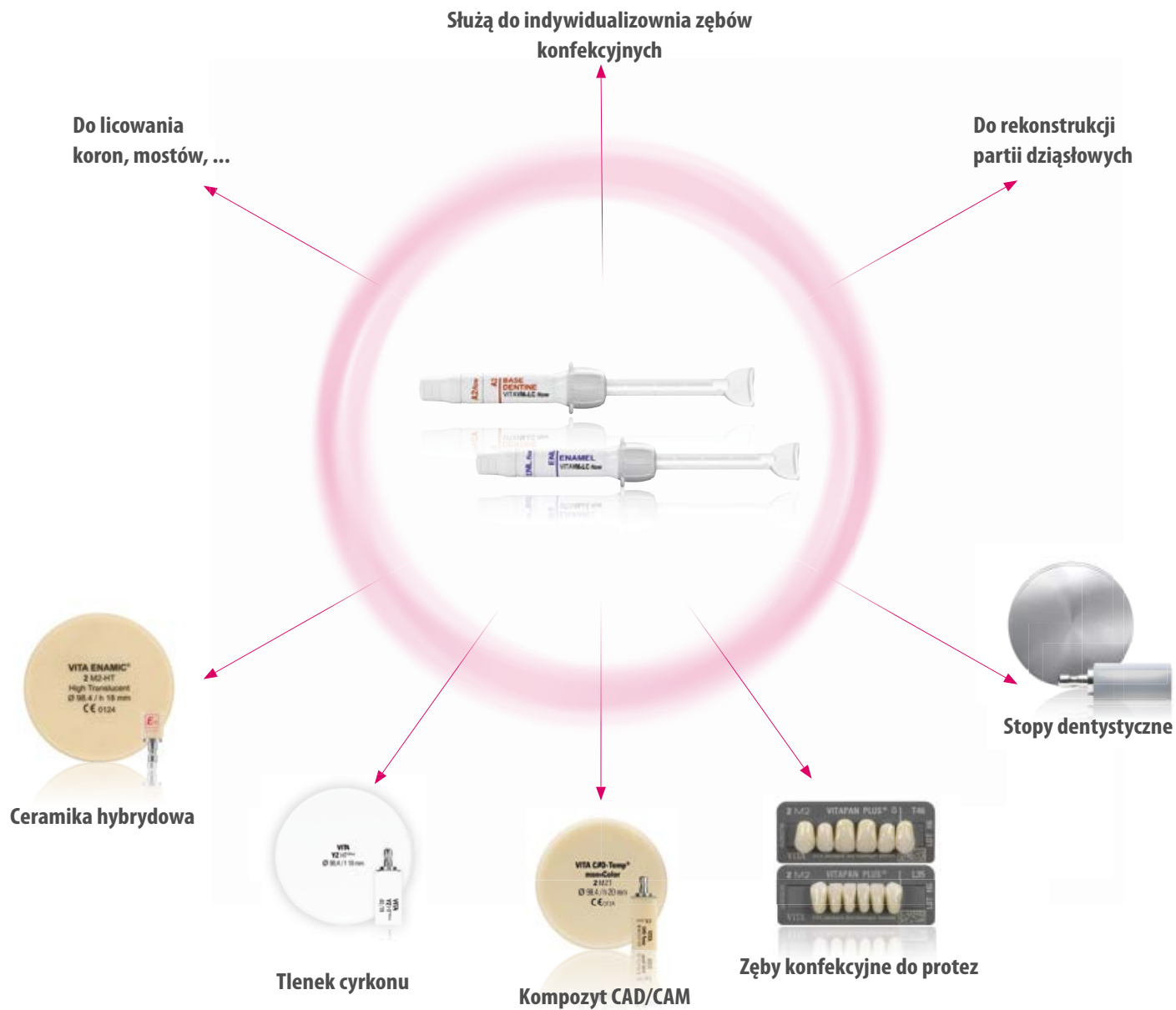

Do jakiego zakresu zastosowania?

- Licowanie koron, mostów, koron teleskopowych i suprakonstrukcji implantologicznych
- Indywidualizacja zębów konfekcyjnych do protez
- Rekonstrukcja partii dziąsłowych

Dla jakich materiałów?

- Stopy dentystyczne
- Ceramika hybrydowa
- Tlenek cyrkonu
- Kompozyt CAD/CAM, PEEK
- Kompozyt-/polimerowe zęby do protez

NARZĘDZIA DO OBRÓBK



- **Pędzelek:**

do modelacji nadają się np: pędzelek nr. 1 VITA (VITA Zahnfabrik) oraz pędzelek lay:art style (Renfert GmbH).



- **Instrumenty polerskie:**

Do politur wstępnej szczególnie zalecamy zestaw VITA ENAMIC Polishing Set technical (VITA Zahnfabrik).



- **Pasty polerskie:**

do wykonania politur na wysoki połysk w kompozycie zalecamy np: pastę polerską Renfert Polish all-in-one (Renfert GmbH).



- **Światło-polimeryzator:**

do polimeryzacji stosujemy powszechnie dostępne światło-polimeryzatory jak np: Speed-Lablight (Hager & Werken), HiLite Power (Heraeus Kulzer), Visio Beta vario (3M ESPE), itp.*



- **Systemy spajające:**

w celu tworzenia spojenia między podbudową metalową i VITA VM LC flow zalecamy stosowanie następujących systemów spajających: Alloy Primer (Kuraray), Signum Metal Bond I + II (Heraeus Kulzer), Rocatec z Espesil (3M ESPE), itp.*



*) Obszerną listę zalecanych światło-polimeryzatorów i systemów spajających znajdują Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com.

ASORTYMENT (PRZEGLĄD)



VITA**VM**®**LC flow** STARTER KIT VITA classical A1–D4® (nr. art. CVLCFSTKC)

Kompaktowy asortyment wprowadzający

Ilość	Zawartość	Materiał
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
6	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1–A4, D3
6	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A1–A4, D3
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
Osprzęt: płytka do rozrabiania preparatów, trzymadełko do pędzelka, końcówki do pędzelków, pędzelek		

VITA**VM**®**LC flow** STANDARD KIT VITA classical A1–D4® (nr. art. CVLCFSDKC)

Asortyment standardowy do reprodukcji kolorów wg standardów classical

Ilość	Zawartość	Materiał
1	3 g	
15	3 g	
15	4 g	
2	4 g	
1	20 ml	
1	10 ml	
1	30 ml	
1	50 ml	
Osprzęt: płytka do rozrabiania preparatów, trzymadełko do pędzelka, końcówki do pędzelków, pędzelki, skala kolorów, szyna do próbek kolorów		



VITA VM[®] LC flow INCISAL KIT (nr. art. CVLCFIK)

Asortyment do tworzenia naturalnych efektów w obszarze brzegu siecznego

Ilość	Zawartość	Materiał
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1, EE2, EE5, EE6, EE7, EE9, EE11, EE12
1		VITA VM INDIVIDUAL kolornik z próbkami kolorów

VITA VM[®] LC flow CHROMA KIT (nr. art. CVLCFCHK)

Asortyment do intensyfikacji koloru w obszarze szyjki / centralnego obszaru zęba


Ilość	Zawartość	Materiał
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1–CP5
1		VITA VM INDIVIDUAL kolornik z próbkami kolorów

VITA VM[®] LC flow GINGIVA KIT (Nr. art. CVLCFGK)

Asortyment do rekonstrukcji partii dziąsłowych

Ilość	Zawartość	Materiał
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1–G5
1		VITA VM INDIVIDUAL kolornik z próbkami kolorów

Dalsze informacje dotyczące materiału VITA VM LC flow znajdą Państwo na stronie: www.vita-zahnfabrik.com

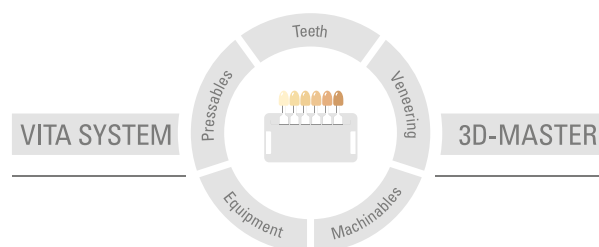

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu w celu kontroli przewidzianego zastosowania. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten będzie stosowany z niezgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych producentów. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww. zestawu.

Wydanie instrukcji obróbki materiału: 07.17

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualną wersję instrukcji obróbki materiału znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie  0124 :

VITA **VM₀LC flow**

W tym dokumencie wszystkie wymienione produkty/systemy innych producentów posiadają zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich producentów.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik