

PRZEWODNIK KLINICZNY



omniCHROMA

Every Shade One Choice

INFORMACJE DODATKOWE


W celu poprawienia estetyki i retencji należy wykonać ścięcie typu bevel na krawędzi szkliwa w ubytkach w odcinku przednim.

omniCHROMA

Kolor pasty OMNICHROMA jest biały-opakerowy przed utwardzeniem. Nabywa naturalnego wyglądu i dopasowuje się do tkanek otaczającego zęba po utwardzeniu światłem.

Przed polimeryzacją

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

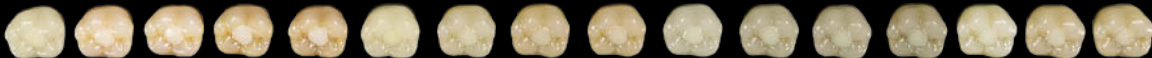

Po polimeryzacji



— OMNICHROMA — **BLOCKER**

Użyj BLOCKER pod materiał OMNICHROMA w bezpośredniej odbudowie rozległych ubytków klasy III lub IV, jako cienkiej warstwy w ścianie językowej.

Grubość warstwy BLOCKER OMNICHROMA zależy od danego przypadku klinicznego. Poniższy przypadek ilustruje warstwę 0,5 mm, ale może ona być grubsza dla bielszych i nieprzeziernych zębów lub cieńsza dla zębów chromatycznych i przeziernych.

