

NAUKOWE WYJAŚNIENIE UNIWERSALNOŚCI

Oryginalne technologie Tokuyama Dental zapewniają bezpieczną siłę wiązania.

Adhezyjne monomery

3D-SR Monomer zapewnia chemiczne wiązanie do tkanek zęba, cyrkonu, tlenku glinu i nieszlachetnych metali.

y-MPTES reaguje z powierzchnią ceramiki szklanej.

Katalizator polimeryzacji

Technologia BoSE wykazuje wysoką aktywność katalityczną w środowisku kwasowym. Cienka warstwa wiążąca uformowana po rozdmuchaniu powietrzem staje się twarda dzięki przyspieszonemu postępowi polimeryzacji i wiązania na powierzchni adhezyjnej (Contact Cure), gdy wchodzi w kontakt z materiałami żywicznymi.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II

MTU-6 wchodzi w reakcję z metalami szlachetnymi.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Zestaw:

- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II A / 5 ml
- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II B / 4 ml
- aplikatory x25
- pojemnik do mieszania
- jednorazowy pojemnik do mieszania x5



Opakowania uzupełniające:

- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND II A / 5 ml
- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND II B / 4 ml



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

marrodent
A HENRY SCHEIN COMPANY

43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 3, tel. 33 810 13 28

sklep.marrodent.pl | marrodent.pl

Tokuyama Dental

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II

SAMOUTWARDZALNY UNIWERSALNY SYSTEM WIĄZĄCY



Ułatwienie pracy stomatologa

z TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II, doskonała adhezja dla:

- 1
WSZYSTKICH
PROCEDUR
- 2
WSZYSTKICH
TECHNIK
- 3
WSZYSTKICH
MATERIAŁÓW

1 WSZYSTKIE PROCEDURY

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II jest systemem adhezyjnym przeznaczonym zarówno dla bezpośrednich, jak i pośrednich odbudów i może być wykorzystywany w technikach samowytrawiania, selektywnego wytrawiania oraz całkowitego wytrawiania. Jako uniwersalny materiał adhezyjny TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II został zaprojektowany, aby być w pełni kompatybilnym ze światłoutwardzalnymi, samoutwardzalnymi i podwójnie wiążącymi materiałami kompozytowymi. TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II zwiększa również siłę wiązania polimeryzujących materiałów żywicznych do wszystkich materiałów stosowanych w technice pośredniej.

ŁATWOŚĆ STOSOWANIA

- bez czekania po aplikacji bondu
- bez naświetlania
- bez konieczności przechowywania w lodówce

ODBUDOWY BEZPOŚREDNIE I WEWNĄTRZYSTNA NAPRAWA ODBUDÓW MATERIAŁEM KOMPOZYTYWYM



► Odbudowa kompozytowa



► Wewnętrzna naprawa



CEMENTOWANIE UZUPEŁNIEŃ POŚREDNICH



► Cementowanie



► Odbudowa zębów zęba



2 WSZYSTKIE TECHNIKI

Kompatybilność ze wszystkimi technikami wytrawiania


TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II może być wykorzystany z technikami samotrawiącymi, selektywnego wytrawiania oraz całkowitego wytrawiania.

Kompatybilność ze wszystkimi materiałami kompozytowymi

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II jest kompatybilny ze światłoutwardzalnymi, podwójnie wiążącymi oraz samowiążącymi materiałami kompozytowymi stosowanymi we wszystkich technikach bezpośrednich i pośrednich wypełnień bez konieczności użycia oddzielnego aktywatora.

3 WSZYSTKIE MATERIAŁY

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II przylega do każdego materiału jak i do zęba bez dodatkowych primerów.

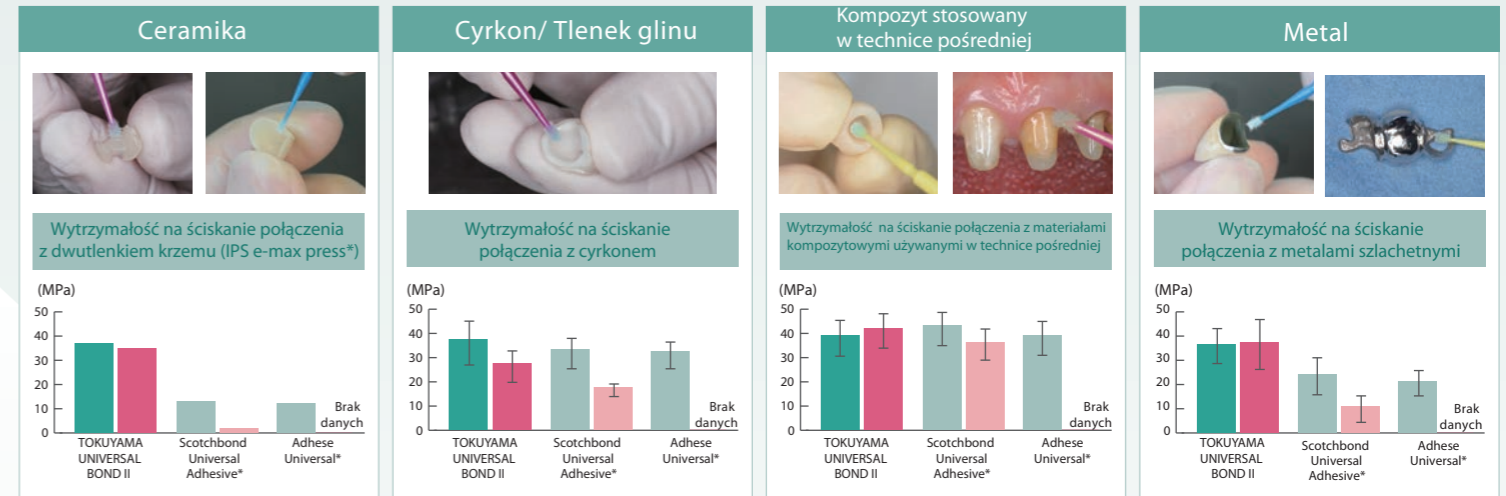

■ Po 24 godzinach przechowywania ■ Po 30000 termo cyklach

Źródło: Dr. Ouchi, Dr. Miyazaki, et al. Uniwersytet Nihon
35 Doroczne spotkanie Japońskiego Stowarzyszenia Stomatologii Adhezyjnej, 2016

*nie jest zarejestrowanym znakiem handlowym Tokuyama Dental Corporation.

POWIĄZANE PRODUKTY

Adhezyjny cement kompozytowy ESTECEM II PLUS

Uniwersalne zastosowanie - z niezawodną przyczepnością i estetyką!

ESTECEM II PLUS jest cementem kompozytowym światło i chemoutwardzalnym, przeznaczonym do całego spektrum wskazań w cementowaniu. Zastosowany razem z TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II, ESTECEM II PLUS może być stosowany uniwersalnie na wszystkich powierzchniach protetycznych bez ograniczeń. Bez dodatkowych primerów lub aktywatorów.

Na wszystkich powierzchniach obowiązuje zawsze ta sama procedura: zmieszać 1:1, nałożyć, przedmuchać powietrzem, gotowe!

Wskazania

- Cementowanie koron, mostów, inlay, onlay, overlay, wkładów i nakładów wykonanych ze szkła/ ceramiki oksydacyjnej (porcelany, tlenku cyrkonu i tlenku glinu), metali/ stopów (szlachetnych i nieszlachetnych) oraz tworzyw sztucznych, w tym wypełniaczy nieorganicznych (materiały kompozytowe).
- Naprawa złamanych koron, licówek i wszystkich uzupełnień ceramicznych.
- Cementowanie licówek.
- Cementowanie mostów adhezyjnych.
- Cementowanie rdzeni metalowych lub z tworzywa sztucznego, wkładów metalowych lub z włókna szklanego, koron na implantach.

Dostępne kolory

- **Uniwersalny A3:** idealny do uzupełnień estetycznych w odcinku przednim i ogólnie do szerokiej gamy przypadków dopasowania odcienia. Odcień uniwersalny znajduje się w zestawie.
- **Clear:** odcień bezbarwny i przezroczysty. Odpowiedni dla koron i licówek estetycznych, gdzie kolor zęba bazowego zapewnia większość potrzeb kolorystycznych.
- **Brown:** odcień mający kolor zębiny. Nadaje się do koron ceramicznych lub z żywicy kompozytowej.
- **White-Opaque:** odcień o wysokiej nieprzezierności. Nadaje się do licówek i innych przypadków wymagających zamaskowania koloru podbudowy.

Zestaw (uniwersalny)

- PASTA (A/B) UNIVERSAL 2,3 ml każda (4,7 g każda) x1
- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II A
- TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II B
- końcówki do mieszania cementu x15
- końcówki mieszające (Mini Mixing Tips) x5
- nakładka do końcówki mieszającej (Mini Mixing Tip) x5
- aplikatory x25
- pojemnik do mieszania x1

Uzupełnienie pasty

Pasta A/B 2,3 ml każda (4,7 g każda) (Uniwersalny A3, Clear, Brown, White-Opaque)

