

Aparaty Carriere Motion klasa II i III

Instrukcja obsługi



Carriere® Motion™
Class III Appliance



Carriere Motion
Class II Appliance

Zmiana paradygmatu w leczeniu ortodontycznym



Leczenie można rozpocząć natychmiast po konsultacji z pacjentem.

- ▶ Pomiar i założenie aparatu Motion Appliance trwa mniej niż 15 minut.
- ▶ Bez konieczności separacji, pierścieni, koron i zaangażowania laboratorium




W przeciwieństwie do innych aparatów dla klasy II i klasy III, Motion jest:

- ▶ Prosty w użytkowaniu, klejony bezpośrednio bez push rods, sprężyn lub dodatkowych zaczepów.
- ▶ Bez konieczności separacji, pierścieni, koron i zaangażowania laboratorium


Dzięki aparatom *Motion Appliances* pacjenci odczuwają mniejszy ból i większy komfort w porównaniu z innymi aparatami klasy II.

Zmiana paradygmatu w leczeniu ortodontycznym

Aparaty Motion są stosowane na początku leczenia, kiedy współpraca pacjenta jest na najwyższym poziomie i nie występują siły spowalniające ruchy zębów.

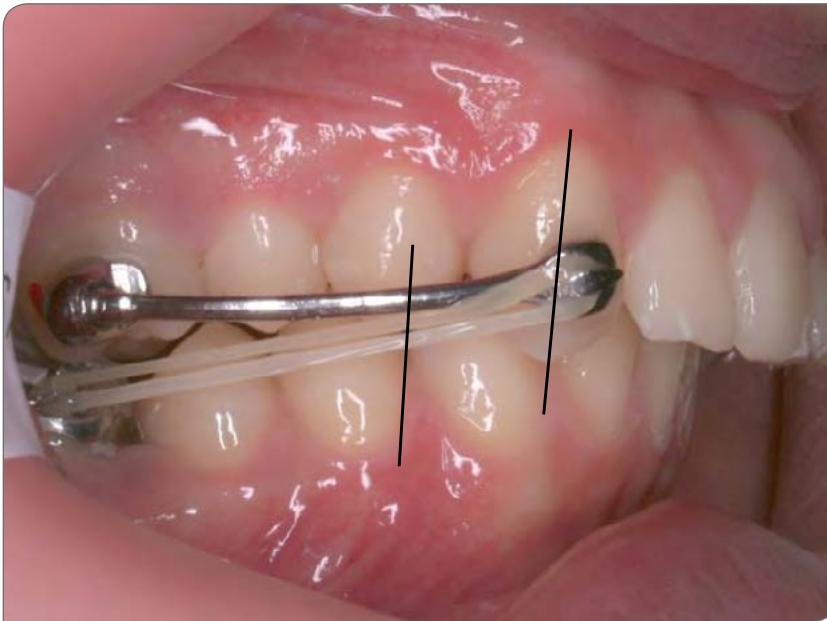

Aparat *Motion* umieszczony na początku leczenia

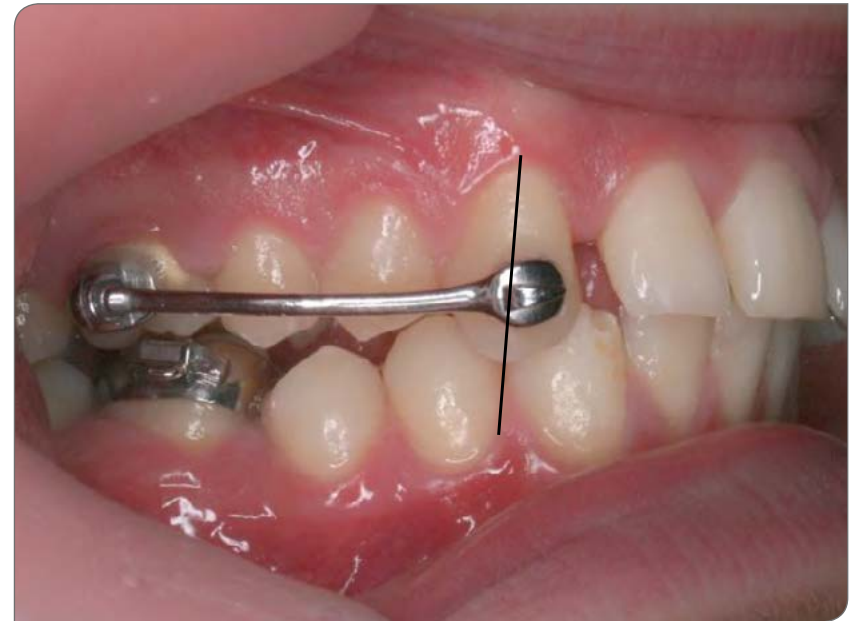

Klasa I osiągnięta w ciągu 3-4 miesięcy

Zmiana paradygmatu w leczeniu ortodontycznym

Po uzyskaniu klasy I, **czas leczenia pacjenta aparatem ortodontycznym może być krótszy do 7-10 miesięcy lub mniej**, gdy zastosujemy zamki Carriere SLX™3D



Stan początkowy



Po 14 dniach zdjęto aparat 3D i naklejono zamki SLX® 3D Brackets od 4 do 4



Przyklejono wszystkie zamki po 4 miesiącach

The *Motion* Class II Appliance



Eleganckie i minimalnie inwazyjne rozwiązanie dla:

- ▶ Leczenie relacji zębów klasy II do klasy I u pacjentów w każdym wieku
- ▶ Korygowania wad zgryzu klasy II szybciej niż jakiegokolwiek innym aparatem dostępnych obecnie na rynku*
- ▶ Leczenie przypadków obustronnych, jednostronnych i z uzębieniem mieszanym
- ▶ Skrócenie całkowitego czasu leczenia
- ▶ Zwiększenie wydajności i produktywności gabinetu

*"Treatment effects of the Carriere Distalizer (Motion) using lingual arch and full fixed appliances;" Journal of the World Federation of Orthodontists- May 2014

„Zastosowanie aparatu Motion było jednym z najbardziej znaczących innowacji w leczeniu, jakie wdrożyłem w mojej praktyce w ciągu ostatnich pięciu lat”.

- Ron Maddox, D.D.S., San Dimas, CA


Biometria urządzenia *Motion klasy II*

Przed leczeniem



1. Nadmierny overbite
2. Stłoczenie w odcinku przednim
3. Mezzjalnie zrotowane zęby trzonowe

Po leczeniu

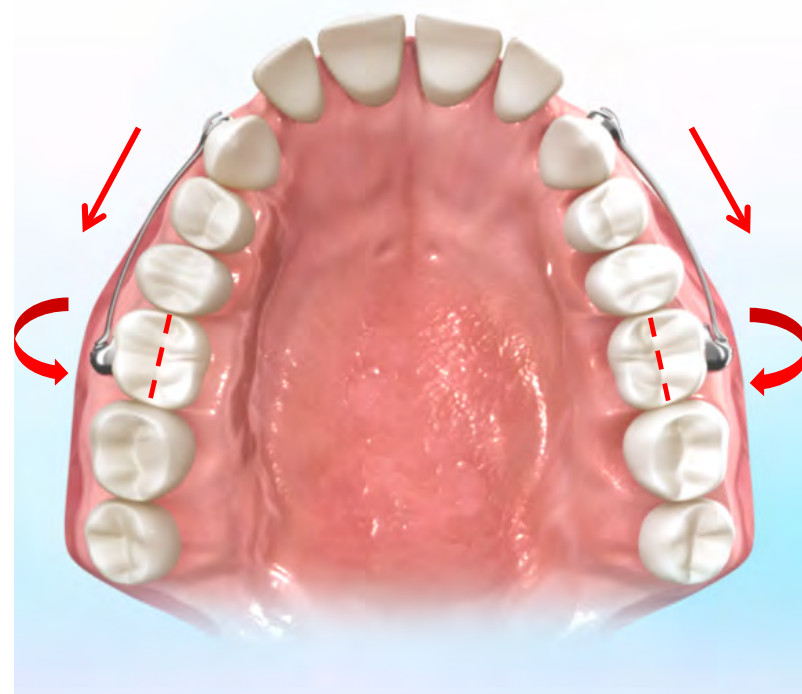

1. Zęby trzonowe są odrotowane i spionizowane
2. Uzyskanie przestrzeni umożliwiającej skorygowanie stłoczeń bez konieczności ekstrakcji
3. Zęby trzonowe i kły w relacji klasy I


Bez sprężyn, push rods,
pierścieni czy koron, które
komplikowałyby życie Tobie,
Twojemu personelowi lub
Twoim pacjentom.

Główne cechy urządzenia *Motion* klasy II

Zawias kulowy skutecznie
odrotowuje i pionizuje zęby
trzonowe.

Smukła, wygodna konstrukcja
zapewnia wyjątkowy komfort.

Haczyki umożliwiają łatwą
aplikację wyciągów
wewnątrzustnych.

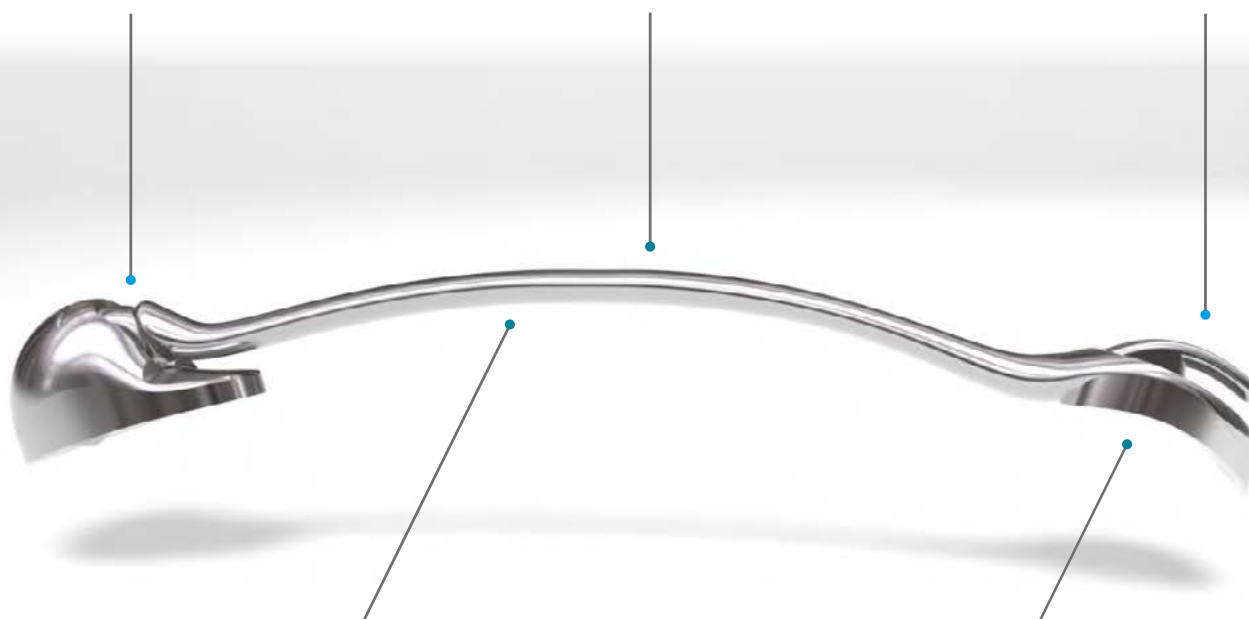

Sztywne ramię biegnie nad dwoma
górnymi przedtrzonowcami po lekkim
łuku. Utrzymuje dokładną przestrzeń
między przedtrzonowcami
podczas przesunięcia.

Podstawa jest przyklejona do części mezialnej
kła i umożliwia ruch kła wzdłuż wyrostka
zębodołowego bez przechylania.

Przygotowywanie dolnego łuku do leczenie aparatem *Motion* klasy II

1. Zanim Motion Appliance zostanie przyklejony na górnym łuku, należy wybrać solidne i stałe źródło zakotwiczenia na żuchwie, aby uniknąć protruzji dolnych siekaczy.
2. Zakotwiczenie może być wybrane w oparciu o preferencje ortodonta. Zalecany źródłem zakotwienia jest dolny aparat Essix® z bezpośrednio przyklejonymi rurkami na dolnych trzonowcach.
3. Zalecany materiał Essix to A+ o grubości .040" (1 mm). Jeśli drugie dolne trzonowce (L7) są w pełni wyrżnięte, preferuje się ich użycie do umieszczenia tub policzkowych, zamiast pierwszych trzonowców, na których będzie naklejony guzik służący do stosowania wyciągów wewnątrzustnych.



Pomiar i wybranie odpowiedniego aparatu *Motion* klasy II

1. Jak pobrać wymiar szczęki

Za pomocą linijki Motion Ruler (dołączonej do aparatu) należy zmierzyć odległość od **środku bruzdy** policzkowej pierwszego zęba trzonowego szczęki (U6) do **mezjalnej** części powierzchni kła łuku górnego (U3).



Zmierz obie strony. Dostępne są indywidualne rozmiary, aby można było skorygować niesymetryczne wady.

2. Dobór aparatu

Wybierz odpowiedni rozmiar aparatu Motion Appliance, korzystając z pomiaru opisanego powyżej. Gdy pomiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami (np. pomiędzy 24 mm a 25 mm), należy wybrać odpowiedni aparat w zależności od pożądanej wielkości rotacji:

- Większa rotacja zęba trzonowego: wybierz większy rozmiar
- Mniejsza rotacja zębów trzonowych: wybierz mniejszy rozmiar




Przygotowanie do naklejenia aparatu *Motion dla klasy II*

1. Jak przygotować zęby do klejenia systemem światłoutwardzalnym:

- a. Należy **oczyścić** powierzchnię 1 górnego trzonowca i górnego kła (lub 1 górnego przedtrzonowca) za pomocą pasty profilaktycznej.
- b. Dokładnie **wypłukać** zęby wodą i wysuszyć.
- c. **Wytrawić** powierzchnię zęba trzonowego i górnego kła (lub górnego pierwszego przedtrzonowca) w sposób odpowiedni dla wybranego systemu łączącego.
- d. Dokładnie **wypłukać** zęby wodą.
- e. **Zastosować krótki strumień powietrza** na powierzchni wytrawionego kła i trzonowca. Upewnić się, że cały obszar jest suchy.
- f. **Nałożyć jednolitą warstwę primera** na powierzchnię górnego pierwszego trzonowca i górnego kła (lub pierwszego górnego przedtrzonowca), aby uzyskać maksymalną siłę wiązania.

2. Nałożyć obficie klej światłoutwardzalny na obie podkładki.

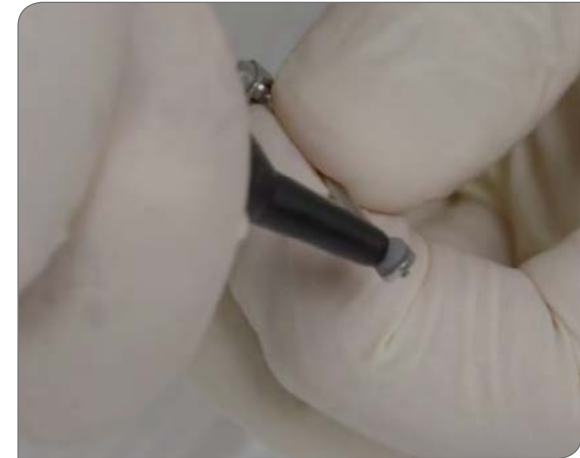

Przygotowanie i pozycjonowanie urządzenia *Motion* klasy II



1. Pozycjonowanie

- a. Używając kleszczy hemostatycznych, lub innych, albo pęsety, chwyć ramię aparatu Motion Appliance i umieść go na zębach.

- b. Umieść podstawę najpierw na zębie trzonowym, a następnie na kle od strony **mezjalnej** (lub pierwszego zęba przedtrzonowego). Wertykalne wcięcie na tylnej podstawie aparatu Motion Appliance powinno znajdować się na środku powierzchni policzkowej zęba trzonowego.



2. Wyrównanie

Umieść aparat Motion Appliance w optymalnej pozycji, ustawiając obie nakładki na powierzchni zęba.

Klejenie aparatu *Motion* klasy II

1. Usuń nadmiar kleju za pomocą kleszczy lub pęsety z powierzchni zęba, zachowując prawidłowe ustawienie aparatu Motion Appliance.
2. Należy całkowicie utwardzić klej na zębie trzonowym.
3. Następnie całkowicie utwardzić klej na kle (lub przedtrzonowcu).



Przygotowanie i pozycjonowanie urządzenia *Motion* klasy II

1. Po założeniu dolnego aparatu Essix, załóż wyciągi wewnętrzne do dolnego 1. (lub 2.) trzonowca, a następnie rozciągnij ją i przymocuj do haczyka na podkładce kła górnego aparatu Motion Appliance.
2. Szczegółowe informacje na temat rozmiaru i sile wyciągów wewnętrznych znajdują się w Instrukcji stosowania na następczej stronie.
3. Następną wizytę należy zaplanować po 4 do 6 tygodniami od założenia aparatu, a następnie w odstępach 6 tygodniowych, aż do uzyskania pożądanego efektu leczenia. Wizyty kontrolne powinny trwać tylko kilka minut - należy obserwować przebieg leczenia, wyjaśnić pacjentowi postępy oraz pochwalić lub zachęcić do przestrzegania zaleceń.




Protokoły stosowania wyciągów dla aparatu *Motion* klasy II


Protokół standardowy

- Pierwszy miesiąc: wyciągi Force 1 (6 oz, 1/4")
- Po pierwszym miesiącu: wyciągi Force 2 (8 oz, 3/16")

Motion od 3 do 6 z rurką na dolnej 7

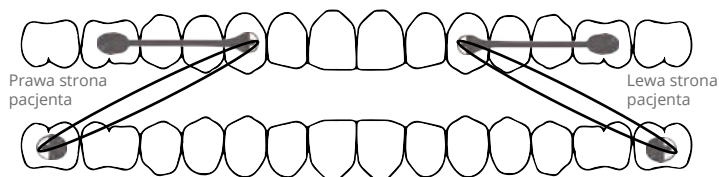

Motion od 4 do 6 z rurką na dolnej 6

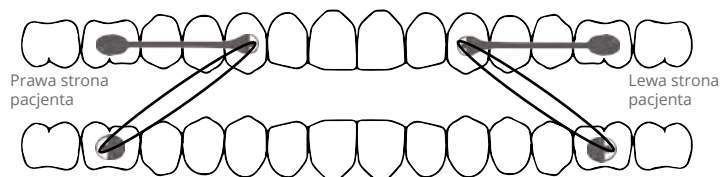


Protokół standardowy przy zablokowanych kłach

Dotyczy kłów zatrzymanych wysoko lub przemieszczonych w kierunku policzkowym.


Motion od 4 do 6 z rurką na dolnej 7

- Pierwszy miesiąc: wyciągi Force 1 (6 oz, 1/4")
- Po pierwszym miesiącu: wyciągi Force 2 (8 oz, 3/16")

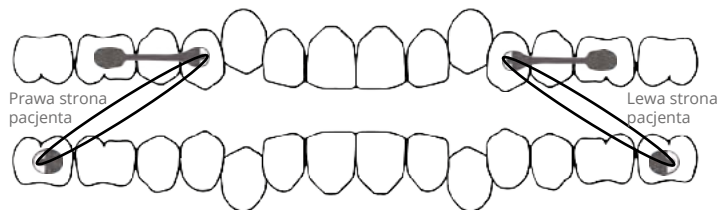

Motion od 4 do 6 z rurką na dolnej 6

- Po pierwszym miesiącu: wyciągi Force 2 (8 oz, 3/16")

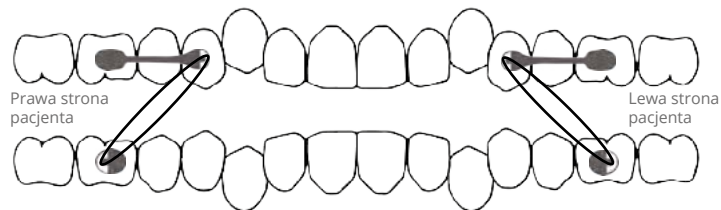


Protokoły stosowania wyciągów dla aparatu *Motion* klasy II

Protokół przy uzębieniu mieszanym z niewyrzniętym do końca kłębem


2/3 kła musi być wyrznięty

- Pierwszy i drugi miesiąc 2 oz 1/4"
- Trzeci i czwarty miesiąc 4 oz 1/4"
- Piąty i szósty miesiąc 4 oz 1/4" lub 6 oz 1/4" zależy od decyzji lekarza

Motion od niewyrzniętego kła do rurki na dolnej 7

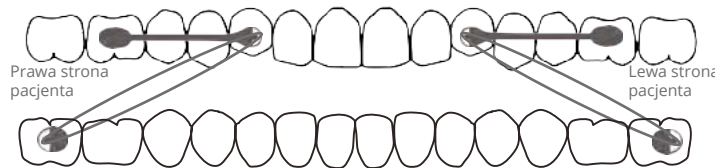

Motion od niewyrzniętego kła do rurki na dolnej 6

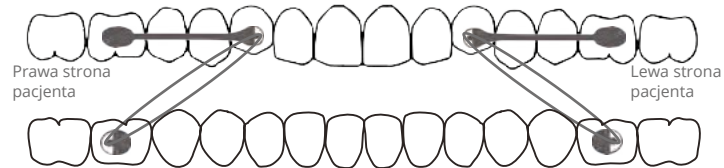


Dorośli pacjenci z wysoką gęstością kości

Jeśli po trzech miesiącach stosowania standardowego protokołu u pacjentów z wysoką gęstością kości, z wadą zgryzu klasy II, podgrupy II, nie wystąpił żądany efekt, należy wprowadzić następujące czynności:

Motion od 3 do 6 z rurką na dolnej 7

Pierwszy miesiąc nocą: 2 wyciągi Force 1 i 2 (6oz, 1/4" i 8 oz, 3/16")


- Pierwszy miesiąc w dzień: pojedynczy wyciąg Force 2 (8 oz, 3/16")
- Trzeci i czwarty miesiąc 4 oz 1/4"

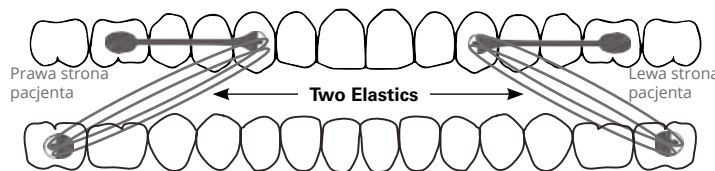

Motion od 3 do 6 z rurką na dolnej 6

Pierwszy miesiąc nocą: 2 wyciągi Force 2 (8 oz, 3/16")

- Drugi miesiąc i kolejne: pojedynczy wyciąg Force 2 (8 oz, 3/16")

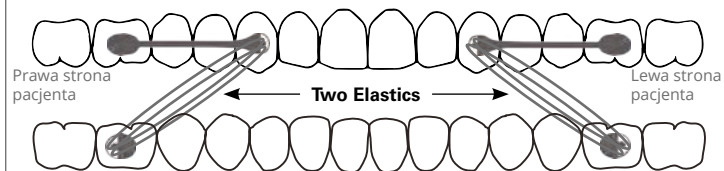

Wybór wyciągów do aparatów *Motion* klasy II

Dostępne wyciągi wewnętrzne Carriere:

- ▶ Force 1: 6 oz, 1/4" (424-9F1)
- ▶ Force 2: 8 oz, 3/16" (424-9F2)



Zdejmowanie aparatu *Motion* klasy II

- 1. Usunąć nadmiar kleju** wokół podstawy na kle (lub pierwszym przedtrzonowcu) i trzonowcu, przy użyciu stożkowego wiertła w kształcie płomienia. Lekkie wcięcie powinno pojawić się wokół podstawy.
- 2. Poproś pacjenta o przygryzienie bawełnianego wałka** umieszczonego prostopadle do kła lub zęba przedtrzonowego, aby zapewnić jego stabilność.
- 3. Narzędzia do zdejmowania:**
 - a. Kleszcze do zdejmowania zamków (PN 204-219)
 - b. Kleszcze kątowe do zdejmowania zamków (PN 204-220XL)
 - c. Obcinaki Micro Mini Pin i do ligatur (PN 204-107 or 107XL Long Handle)
- 3. Należy użyć jednego z zalecanych instrumentów do zdejmowania i umieścić końcówki w miejscu styku** podstawy na kle z powierzchnią zęba. Wsuń instrument od mezjalnej strony kła lub przedtrzonowca i przyłóż siłę w kierunku okluzyjnym/dziąstowym. Delikatnie ściskaj, wywierając coraz większy nacisk, bez skręcania lub ciągnięcia, aż do momentu odklejenia.
- 5. Po odklejeniu podstawy z kła, należy poprosić pacjenta o przygryzienie bawełnianego wałka** umieszczonego w okolicy trzonowca, a następnie odkleić podstawę z trzonowca.
- 6. Należy wziąć jeden z instrumentów** do zdejmowania i wsunąć od strony mezjalnej podstawy na trzonowcu. Należy delikatnie ściskać instrument zwiększając siłę, aż do odklejenia się aparatu.
- 7. Za pomocą wiertła lub kleszczy** (PN 204-206) należy usunąć nadmiary kleju z powierzchni zęba trzonowego i kła lub przedtrzonowca.
- 8. Wypoleruj zęby** aby uzyskać gładką, czystą powierzchnię.

Zdjęcie aparatu *Motion* klasy II



Usunąć klej z części dystalno-siecznej podstawy, gdzie przymocowany jest aparat.



Usunąć klej z części dystalno-dziąsłowej podstawy, gdzie przymocowany jest aparat.

Zdejmowanie aparatu *Motion* klasy II
























Najpierw usuń podstawę z kła. Poproś pacjenta o mocne nagryzienie bawełnianego wążka. Umieść kleszcze w miejscu, z którego usunięto cement za pomocą wiertła. Zaciśnij energicznie kleszcze na styku podstawy i zęba. Jeśli aparat nie udaje się usunąć, należy zmienić pozycję i spróbować ponownie.



Usuń podstawę z zęba trzonowego. Umieść kleszcze na trzonowcu i wykonaj szybki obrót nadgarstka w dół w kierunku powierzchni okluzyjnej. Jeśli się nie poluzuje, należy zmienić pozycję i spróbować ponownie.

Aparat *Motion* Klasa II

Numery katalogowe

DESCRIPTION/SIZE				CATALOG NUMBER LEFT & RIGHT (1 SET)
KITS				
<i>Motion</i> Trial Kit (1 Set of each 23, 25, 27 mm)				424-900CN
<i>Motion</i> Intro Kit (1 Set of each 16, 18, 20, 23, 25, 27 mm)				424-901CN
<i>Motion</i> Standard Kit (20 sets) Kit Include: 2 sets of 16 mm 3 sets of 18 mm 2 sets of 20 mm 3 sets of 23 mm 6 sets of 25 mm 4 sets of 27 mm				424-902CN
DESCRIPTION/SIZE	COLOR-CODE	ITEM NUMBERS LEFT	ITEM NUMBERS RIGHT	CATALOG NUMBERS LEFT & RIGHT (1 SET)
<i>Motion</i> Class II 12 mm	—	424-912LN	424-912RN	424-912CN
<i>Motion</i> Class II 13 mm	—	424-913LN	424-913RN	424-913CN
<i>Motion</i> Class II 14 mm	—	424-914LN	424-914RN	424-914CN
<i>Motion</i> Class II 15 mm	Yellow	424-915LN 	424-915RN  	424-915CN
<i>Motion</i> Class II 16 mm	White	424-916LN 	424-916RN  	424-916CN
<i>Motion</i> Class II 17 mm	Red	424-917LN 	424-917RN  	424-917CN
<i>Motion</i> Class II 18 mm	Blue	424-918LN 	424-918RN  	424-918CN
<i>Motion</i> Class II 19 mm	Green	424-919LN 	424-919RN  	424-919CN
<i>Motion</i> Class II 20 mm	Pink	424-920LN 	424-920RN  	424-920CN
<i>Motion</i> Class II 21 mm	Purple	424-921LN 	424-921RN  	424-921CN

Aparat *Motion* Klasa II

Numery katalogowe

DESCRIPTION/SIZE	COLOR-CODE	CATALOG NUMBERS LEFT	CATALOG NUMBERS RIGHT	CATALOG NUMBERS LEFT & RIGHT (1 SET)
<i>Motion</i> Class II 22 mm	Black	424-922LN ●	424-922RN ● ●	424-922CN
<i>Motion</i> Class II 23 mm	Yellow	424-923LN ●	424-923RN ● ●	424-923CN
<i>Motion</i> Class II 24 mm	White	424-924LN ○	424-924RN ○ ○	424-924CN
<i>Motion</i> Class II 25 mm	Red	424-925LN ●	424-925RN ● ●	424-925CN
<i>Motion</i> Class II 26 mm	Blue	424-926LN ●	424-926RN ● ●	424-926CN
<i>Motion</i> Class II 27 mm	Green	424-927LN ●	424-927RN ● ●	424-927CN
<i>Motion</i> Class II 28 mm	Pink	424-928LN ●	424-928RN ● ●	424-928CN
<i>Motion</i> Class II 29 mm	Purple	424-929LN ●	424-929RN ● ●	424-929CN
<i>Motion</i> Class II 30 mm	Black	424-930LN ●	424-930RN ● ●	424-930CN
<i>Motion</i> Class II 31 mm	Gray	424-931LN ●	424-931RN ● ●	424-931CN
<i>Motion</i> Class II 32 mm	—	424-932LN	424-932RN	424-932CN
<i>Motion</i> Class II 33 mm	—	424-933LN	424-933RN	424-933CN
<i>Motion</i> Class II 34 mm	—	424-934LN	424-934RN	424-934CN
DESCRIPTION/SIZE				ITEM NUMBERS
ACCESSORIES				
Typodont- <i>Motion</i> with Clear Aligner				631-017DNE
<i>Motion</i> Storage Tray (1/pk)				CDA-TRAY
Essix, A+ .040 (100/pk)				617-4402
<i>Motion</i> Class II Patient Education Brochure (15/pk)				999-257
<i>Motion</i> Elastic Protocol & Instructions for Patients (50/pk)				999-293

Aparat *Motion* Klasa III



Aparat *Motion* klasy III



Eleganckie i minimalnie inwazyjne rozwiązanie dla:


- ▶ Leczenia przypadków klasy III do optymalnego zgryzu klasy I.
- ▶ Leczenia wysokiego odsetka przypadków szkieletowych klasy III do zgryzu klasy I (dla pacjentów, którzy nie chcą operacji).
- ▶ Leczenia stłoczeń dolnych zębów przednich na początku leczenia (bez zamków).

**Żadnych sprężyn, push rods,
pierścieni ani koron, które
komplikuja sprawy Tobie,
Twojemu personelowi
lub Twoim pacjentom.**

Główne cechy i zalety urządzenia *Motion* klasy III

Proste, bezawaryjne, bezpośrednio połączone z podstawą.

Elastyczne zgięcie w środkowych i dystalnych segmentach, umożliwiające indywidualne dopasowanie do anatomii pacjenta i delikatną zmianę położenia trzonowca.

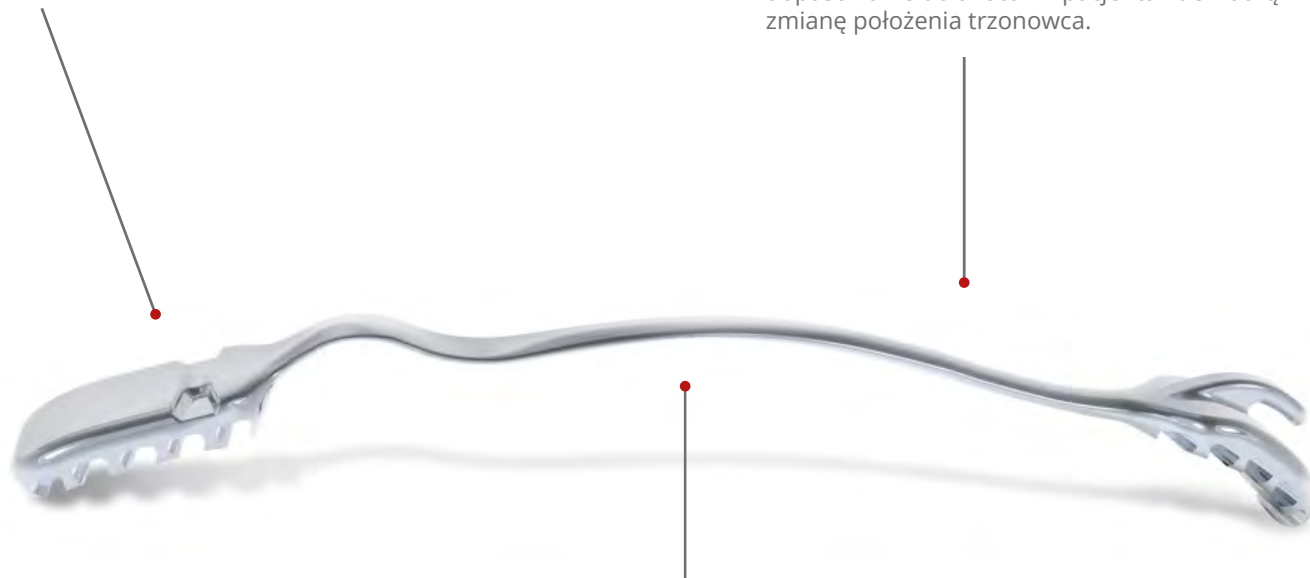

Wysoka elastyczność i unikalne właściwości sprężynujące zapewniają odporność na odkształcenia.

Przygotowanie łuku górnego do założenia aparatu *Motion* klasy III

Wybór odpowiedniego zakotwiczenia może pomóc lekarzom w osiągnięciu określonych celów leczenia związanych z harmonią i równowagą twarzy. Poniżej przedstawiono dwa preferowane źródła zakotwienia:

Opcja 1: Przezroczysta nakładka

- ▶ Zalecana, gdy pożądanym efektem jest zachowanie cech tkanek miękkich pacjenta (kąć, wypełnienie, itp...), gdyż nakładka zapobiegnie dodatkowej protruzji górnego odcinka wargowego i otaczających tkanek miękkich.
- ▶ Przezroczysta nakładka (Essix 0.4, A+) umieszczony w górnym łuku zębowym na początku leczenia, a aparat Motion Appliance kleimy na dolnym łuku.
- ▶ Na górnych trzonowcach bezpośrednio kleimy rurkę policzkową. Wskazana jest aplikacja do górnych drugich trzonowców (jeśli jest to możliwe).



Option 1: Clear Aligner

Opcja 2: Zamki samoligaturujące Carriere SLX 3D

- ▶ Zalecane, gdy pożądanym efektem jest protruzja odcinka wargowego i tkanek miękkich pacjenta pomiędzy punktami podnosowym, wargowym i szczeliny ustnej.
- ▶ Przed zastosowaniem aparatu Motion Appliance, zamki SLX 3D są naklejane na szczękę wraz z okrągłym łukiem ortodontycznym.
- ▶ Po wypoziomowaniu i wyrównaniu górnego łuku zębowego należy przejść na łuk o wymiarach .014 x .025 i nakleić aparat Motion Appliance na dolnym łuku zębowym.



Option 2: Carriere SLX 3D Brackets

Pomiar i wybór aparatu *Motion* klasy III

1. Jak poprawnie zmierzyć, aby dobrać odpowiedni rozmiar:

Używając linijki Motion Ruler (dołączonej do aparatu), zmierz odległość od **środk**a bruzdy policzkowej pierwszego zęba trzonowego żuchwy (L6) do **mezjalnej** powierzchni czołowej kła na żuchwie (L3). Należy pamiętać o zmierzeniu obu stron, ponieważ niektórzy pacjenci mogą potrzebować innego rozmiaru aparatu. Poszczególne rozmiary są sprzedawane oddzielnie, aby dobrać indywidualnie aparat dla pacjenta.

2. Wybór aparatu:

Wybierz odpowiednią długość aparatu Motion, wykorzystując zrobiony pomiar i opisany w rozdziale dot. Klasy II, na stronie 9. Jeżeli pomiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami (np. pomiędzy 25 mm a 27 mm), wybierz odpowiedni aparat w oparciu o pożądaną wartość rotacji.

- ▶ Większa rotacja zębów trzonowych: wybierz większy rozmiar
- ▶ Mniejsza rotacja zębów trzonowych: wybierz mniejszy rozmiar




27mm



Przygotowanie do bondingu aparatu klasy III

1. Przygotować zęby do klejenia systemem światłoutwardzalnym:

- a. Należy **oczyścić** powierzchnię 1 dolnego trzonowca i dolnego kła (lub 1 dolnego przedtrzonowca) za pomocą pasty profilaktycznej.
- b. Dokładnie **wypłukać** zęby wodą i wysuszyć.
- c. **Wytrawić** powierzchnię zęba trzonowego i dolnego kła (lub dolnego pierwszego przedtrzonowca) w sposób odpowiedni dla wybranego systemu łączącego.
- d. Dokładnie **wypłukać** zęby wodą.
- e. **Zastosować krótki strumień powietrza** na powierzchni wytrawionego kła i trzonowca. Upewnić się, że cały obszar jest suchy.
- f. **Nałożyć** jednolitą warstwę primera na powierzchnię dolnego pierwszego trzonowca i dolnego kła (lub pierwszego górnego przedtrzonowca), aby uzyskać maksymalną siłę wiązania.

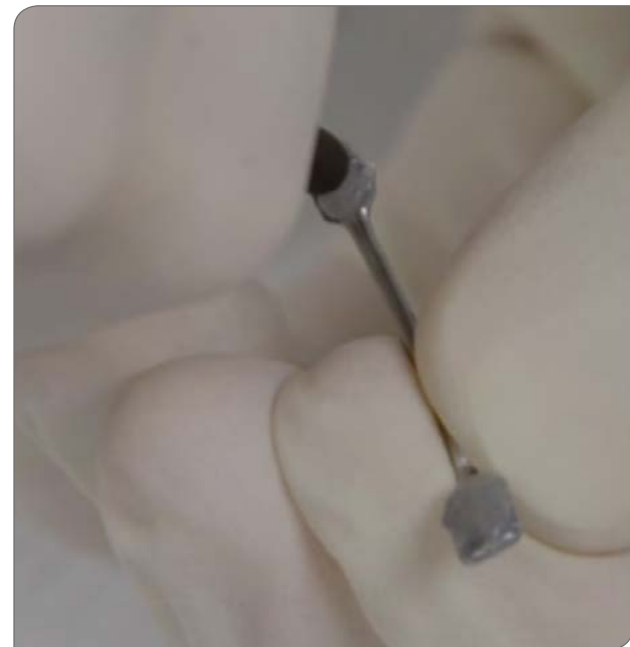

2. Trzymając urządzenie Motion Appliance za ramię, nałożyć obficie klej światłoutwardzalny, całkowicie pokrywając podstawę.

Przygotowanie i pozycjonowanie urządzenia *Motion* klasy III

1. Umieszczenie:

- a. Używając kleszczy hemostatycznych, kleszczy lub pęsety, chwyć ramię aparatu Motion Appliance i umieść go na zębach.
- b. Umieść podstawę najpierw na zębie trzonowym, a następnie na kle od strony **mezjalnej** (lub pierwszego zęba przedtrzonowego). Wertykalne wcięcie na tylnej podstawie aparatu Motion Appliance powinno znajdować się na środku powierzchni policzkowej zęba trzonowego.


2. Wyrównanie:

Należy ustawić aparat Motion Appliance w optymalnej pozycji, dopasowując obie podkładki do powierzchni zęba.



Przygotowanie do bondingu aparatu klasy III

1. Lekko uciśnij palcem w pobliżu podkładki pod kła.
2. Należy usunąć nadmiar kleju wokół podkładki panewki.
3. Należy naświetlać podstawę na kle tylko przez 3 sekundy. Upewnij się, że blokujesz podkładkę na kle dwoma palcami, aby zapobiec utwardzania tylnego segmentu.
4. Należy chwycić pęsetą ramię Motion Appliance, aby podstawę odpowiednio ustawić na trzonowcu. Delikatnie naciśnij, aż będzie ona w pełnym kontakcie z powierzchnią przedsionkową korony zęba trzonowego. Należy usunąć nadmiar kleju wokół podkładki trzonowej. Utrzymując nacisk, należy przystąpić do utwardzania światłem bez zmniejszania nacisku.
5. Teraz, gdy urządzenie Motion Appliance jest dobrze ustawione, należy całkowicie naświetlić podstawę na kle.

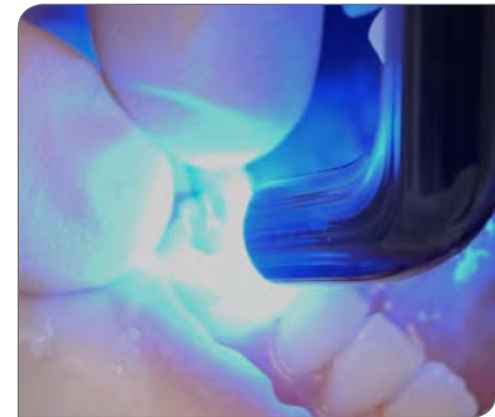

Aktywacja aparatu *Motion Appliance* klasy III

- 1. Po założeniu górnego aparatu Essix, przymocować wyciąg wewnętrzny do rurki policzkowej górnego 1. (lub 2.) trzonowca, a następnie rozciągnąć i przymocować ją do haczyka dolnej podkładki kłowej na aparacie Motion Appliance.**
- Szczegółowe informacje na temat rozmiaru i wytrzymałości wyciągów znajdują się w **Protokole stosowania wyciągów** na następnej stronie.
- 3. Zaplanuj następną wizytę po 4/6 tygodniach od założenia aparatu,** a następnie kolejne w odstępach 6 tygodniowych, aż do osiągnięcia pożądanego efektu leczenia. Wizyty kontrolne powinny trwać tylko kilka minut - należy obserwować przebieg leczenia, wyjaśnić pacjentowi postępy oraz pochwalić i/lub zachęcić do przestrzegania zaleceń.




Protokoły elastyczne dla aparatu *Motion* klasy III


Protokół standardowy

- Wyciąg biegnie od dolnego kła do górnego trzonowca.
- Podczas leczenia należy używać gumki 6 oz, 1/4" (siła 1).

Ruch dolnej 3 do 6 z rurką na górnej 6*

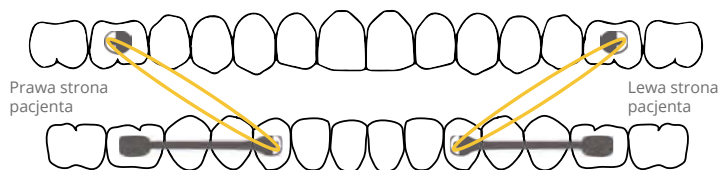

Ruch dolnej 3 do 6 z rurką na górnej 7*

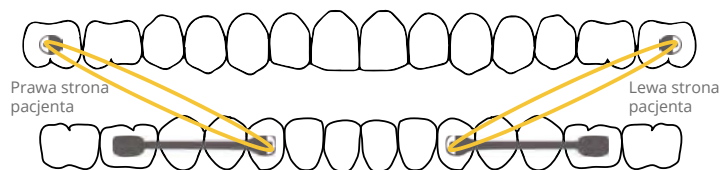


Protokół „krótkich” przypadków

Wyciąg biegnie od pierwszego dolnego przedtrzonowca do górnego pierwszego lub drugiego trzonowca.


Ruch dolnej 4 do 6 z rurką na górnej 6

- Użyj 8 oz, 3/16" (siła 2) gumki podczas całego zabiegu.

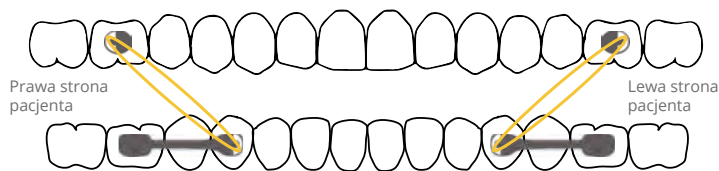

Ruch dolnej 4 do 6 z rurką na górnej 7

- Podczas leczenia używaj gumy 6 oz, 1/4" (siła 1)

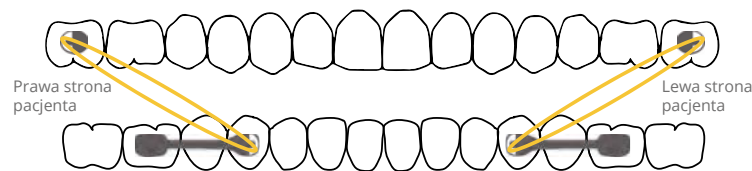

*Uwaga: W obu protokołach gumki noszone są przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasu jedzenia.

Wybór wyciągów do aparatów *Motion* klasy II















Dostępne wyciągi wewnętrzne Carriere:

- ▶ Force 1: 6 oz, 1/4" (424-9F1)
- ▶ Force 2: 8 oz, 3/16" (424-9F2)



Zdejmowanie aparatu *Motion* klasy II

DESCRIPTION/SIZE		PART NUMBER
<i>Motion</i> Class III Trial Kit (1 set of each 23, 25, 27 mm)		424-407C
<i>Motion</i> Class III Intro Kit (1 set of each 16, 18, 20, 23, 25, 27 mm)		428-408C
DESCRIPTION/SIZE	COLOR-CODE	ITEM NUMBERS
<i>Motion</i> Class III 16 mm (1-set)	White 	424-416C
<i>Motion</i> Class III 18 mm (1-set)	Blue 	424-418C
<i>Motion</i> Class III 20 mm (1-set)	Pink 	424-420C
<i>Motion</i> Class III 23 mm (1-set)	Yellow 	424-423C
<i>Motion</i> Class III 25 mm (1-set)	Red 	424-425C
<i>Motion</i> Class III 27 mm (1-set)	Green 	424-427C
<i>Motion</i> Class III 16 mm (1-Universal L/R)	White 	424-416
<i>Motion</i> Class III 18 mm (1-Universal L/R)	Blue 	424-418
<i>Motion</i> Class III 20 mm (1-Universal L/R)	Pink 	424-420
<i>Motion</i> Class III 23 mm (1-Universal L/R)	Yellow 	424-423
<i>Motion</i> Class III 25 mm (1-Universal L/R)	Red 	424-425
<i>Motion</i> Class III 27 mm (1-Universal L/R)	Green 	424-427
ACCESSORIES		PART NUMBERS
Typodont <i>Motion</i> Class III with Clear Aligner		631-033DNE
Typodont <i>Motion</i> Class III Maloccluded with Clear Aligner		631-034DNE
Essix, A+ .040 (100/pk)		617-4402
<i>Motion</i> Storage Tray (1/pk)		CDA-TRAY
<i>Motion</i> Elastic Protocol & Instructions for Patients (50/pk)		999-293

Misją firmy *Henry Schein® Orthodontics™* jest dostarczanie najnowocześniejszych produktów ortodontycznych i innowacyjnych rozwiązań klinicznych, które umożliwiają naszym klientom zapewnienie wyjątkowej opieki nad pacjentem, jednocześnie rozszerzając zakres usług i zwiększając zyski ich gabinetów.

marrodent®

A  HENRY SCHEIN® COMPANY

Marrodent A Henry Schein Company

43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31

Dział Ortodontji

☎ 22 843 06 60 ☎ 604 873 968 ☎ 883 384 983

marrodent.pl

 **HENRY SCHEIN®**
ORTHODONTICS

Rely on Us™