

DEZYNFEKCJA NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

EuroSept® Xtra



Chusteczki do dezynfekcji w Twoim gabinecie.

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes



WYSOKA
JAKOŚĆ



GODNE
ZAUFANIA



SZEROKI
ASORTYMENT

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes

Zalety

- Szerokie spektrum działania antybakteryjnego
- Gotowa do użycia formuła o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej
- Natychmiastowa dezynfekcja bez czwartorzędowych związków amonowych (QAC)
- Innowacyjne dodatki wspomagające



Wskazania do stosowania

Gotowe do użycia chusteczki o znacznie obniżonej zawartości alkoholu, wykonane z niestrzępiącego się materiału flizelinowego. Dostępne jako wersja bezzapachowa lub wersja o zapachu cytrynowym.

Spektrum działania

Bakterie zgodnie z normami EN 13727, EN 1276, EN 13697 (warunki brudne)

Candida albicans zgodnie z normami EN 13624, EN 1650, EN 13697 (warunki brudne)

Patogen gruźlicy (M. terrae) i mykobakteria (M. avium) zgodnie z normą EN 14348 (warunki brudne)

„Ograniczone działanie wirusobójcze” (wirusy otoczkowe, takie jak HBV, HIV, HCV zgodnie z normą EN 14476 i EN 16777) (warunki brudne)

„Ograniczone dodatkowe działanie wirusobójcze” (wirusy otoczkowe, takie jak HBV, HIV, HCV oraz noro- adeno- i rotawirusy zgodnie z normą EN 14476 i EN 16777) (warunki brudne)

Adenowirusy (EN 14476, EN 16777) (warunki czyste)

Poliamowirus SV 40 (RK1/DVV) (warunki czyste)

Czas aplikacji nasączonych chusteczek: Bakterie i Candida albicans zgodnie z normą EN 16615 i VAH (warunki brudne)

Stężenie i czas ekspozycji

stęż. 1 min. Wszystkie rozmiary

stęż. 1 min. Wszystkie rozmiary

stęż. 1 min. Wszystkie rozmiary

stęż. 1 min. Wszystkie rozmiary

stęż. 1 min. Wszystkie rozmiary

stęż. 1 min. Wszystkie rozmiary

stęż. 1 min. Wszystkie rozmiary

stęż. 5 min. XS, S

stęż. 2 min. L

stęż. 1 min. M, XL

Skład Zawartość w 100 g płynu: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes

Chusteczki uzupełnienie 30 x 30cm, 70 szt. (9884937)

Chusteczki L Flowpack 20x30cm, 80 szt. (9884949)

Chusteczki uzupełnienie 15 x 30cm, 140 szt. (9884936)

Chusteczki XL w pojemniku 20x22 cm, 200szt. (9884002)

Chusteczki XL uzupełnienie 20x22 cm, 200szt. (9884003)

Chusteczki XS uzupełnienie 14x18cm, 120szt. (9884196)

Chusteczki XS w pojemniku 14x18cm, 120szt. (9884197)

Produkt uzupełniający: Pudełko do chusteczek 30x30cm/ 15x30cm.....Nr artykułu (9796544)

Szybko działający produkt do dezynfekcji o szerokim spektrum działania

EuroSept® Xtra Surface Disinfection



EuroSept® Xtra Surface Disinfection

Zalety

- Szerokie spektrum działania antybakteryjnego
- Szybko działający produkt, gotowy do użycia
- Formuła na bazie alkoholu całkowicie odparowuje, dzięki czemu na powierzchni nie ma smug*
- Formuła bez czwartorzędowych związków amonowych (QAC)
- Bezzapachowy lub o zapachu cytrynowym



*Tylko do użycia na powierzchniach odpornych na działanie alkoholu.

Spectrum działania

Bakterie zgodnie z normami EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615 (warunki brudne)

Candida albicans zgodnie z normami EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615 (warunki brudne)

Patogen gruźlicy (M. terrae) i mykobakteria (M. avium) zgodnie z normą EN 14348 ((warunki brudne)

Wirusy otoczkowe (e.g., HBV, HIV, HCV) zgodnie z normami EN 14476 and EN 16777 (warunki brudne))

Norowirusy (EN 14476) (warunki czyste)
(EN 16777) (warunki czyste)

Adenowirusy (EN 14476, EN 16777) (warunki czyste)

Poliamowirus SV 40 (RKI/DVV) (warunki czyste)

„limited virucidal plus” (noro, adeno- i rotawirusy) (EN 14476) (warunki czyste)
(EN 16777) (warunki czyste)

Czas ekspozycji

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

Skład

Zawartość w 100g: 20,0g 1-Propanol; 5,0g 2-Propanol

EuroSept® Xtra Surface Disinfection

1L ze spryskiwaczem.....Nr artykułu (9884881)

5L.....Nr artykułu (9884883)

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Lemon

1L ze spryskiwaczem.....Nr artykułu (9884885)

5L.....Nr artykułu (9884887)

Chusteczki do dezynfekcji w Twoim gabinecie.

EuroSept® Xtra System Dry Wipes



WYSOKA JAKOŚĆ



GODNE ZAUFANIA



SZEROKI ASORTYMENT

EuroSept® Xtra System Dry Wipes



Zalety

- Miękkie i niestrzępiące się
- Suche chusteczki w rolce
- Dostępne w dwóch wygodnych rozmiarach
- Kompatybilne z płynami EuroSept® Xtra Surface do dezynfekcji powierzchni

Instrukcja użytkowania

Suche chusteczki nasączyć płynem EuroSept® Xtra-Surface do dezynfekcji powierzchni. Należy użyć co najmniej 1,4 l zalecanego płynu do dezynfekcji

Specyfikacja

Waga	Rozmiar	Arkusze w rolce	Rolki w kartonie	Ilość płynu na rolkę
50g/m ²	15x30cm	140	4	1,4 l
50g/m ²	30x30cm	70	4	1,4 l

Skład

PES 90% / VIS 10%

EuroSept® Xtra System Dry Wipes

M (15x30cm).....Kod produktu (9884930)
XL (30x30cm).....Kod produktu (9884931)

Kompatybilne rozwiązania:

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Alcohol Free

Butelka 1 l z atomizerem.....Kod produktu (9884905)
Kanister 5 l.....Kod produktu (9884907)

EuroSept® Xtra Surface Disinfection

Butelka 1 l z atomizerem.....Kod produktu (9884881)
Kanister 5 l.....Kod produktu (9884883)

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Lemon

Butelka 1 l z atomizerem.....Kod produktu (9884885)
Kanister 5 l.....Kod produktu (9884887)

Produkt uzupełniający:

Pudełko do chusteczek.....Kod produktu (9796544)

ZAMWÓW ONLINE

www.sklep.marrodent.pt

Skuteczna dezynfekcja dużych powierzchni.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection
Concentrate Alcohol Free**



WYSOKA
JAKOŚĆ



GODNE
ZAUFANIA



SZEROKI
ASORTYMENT

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Concentrate Alcohol Free



Zalety

- Produkt odpowiedni do stosowania na dużych powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu
- Szerokie spektrum działania bez lepkości pozostałości
- Nadaje się do systemów dozujących
- Bez aldehydów i fenoli
- Skoncentrowana formuła zapewniająca mniejsze opakowania i bardziej zrównoważony rozwój

Instrukcja użycia

W celu ograniczenia piany, w pierwszej kolejności wlej do pojemnika wodę, a następnie koncentrat.

Roztwór	Koncentrat	Woda
1L	40ml	960ml
2L	80ml	1920ml
3L	120ml	2880ml
5L	200ml	4800ml
8L	320ml	7680ml
10L	400ml	9600ml

Spektrum działania

Bakterie i Candida albicans (EN 13727, EN 13697, EN 13624, VAH, EN 16615) (warunki brudne)

Gruźlica (M. terrae) zgodnie z normą EN 14348 (warunki czyste)
(warunki czyste)
(warunki brudne)

"Ograniczone działanie wirusobójcze" (wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV, np. HBV, HCV, HIV) (warunki brudne)

Rotawirus (EN 14476) (warunki czyste)

Norowirus (EN 14476) (warunki brudne)

Adenowirus (EN 14476) (warunki czyste)

"Limited virucidal plus" (EN 14476) (warunki czyste)

Poliomawirusy SV40 (EN 14476) (warunki brudne)

Stężenie i czas ekspozycji*

0,5% 15 min.

2,0 % 15 min.

0,5 % 60 min.

1,0% 60 min.

0,5% 15 min.

0,5% 15 min.

1,5% 15 min. 1,0% 60 min.

2,0% 30 min.

2,0% 30 min.

1,0% 15 min.

Skład

Zawartość w 100 g: 10,8 g Didecyldimethylammoniumchloride, 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

*Nie wycierać do sucha przed upływem czasu aplikacji.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection
Concentrate Alcohol Free**

5L.....Nr artykułu (9884903)

IDEALNY DUET DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI SYSTEMÓW SSĄCYCH

Koncentrat EuroSept® Xtra Evac jest systemem dwuskładnikowym (Daily – środek do codziennego stosowania oraz Weekly – środek do stosowania raz w tygodniu), przeznaczonym do czyszczenia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu oraz spluwaczek. Razem skutecznie usuwają osady organiczne i nieorganiczne oraz nieprzyjemny zapach utrzymując urządzenia w czystości.

EuroSept® Xtra Evac Cleaner Concentrate Weekly

Niskopieniący koncentrat WEEKLY jest koncentratem na bazie kwasu, o bardzo dobrej zgodności materiałowej. Jest najbardziej skuteczny w usuwaniu złożeń organicznych (krew, ślina, drobnoustroje) i zapobiega tworzeniu się biofilmu. Nie zawiera aldehydu, fenolu ani chloru. Systemy ssące należy czyścić raz lub dwa razy w tygodniu.

EuroSept® Xtra Evac Cleaner Concentrate Weekly 1L	5722798
EuroSept® Xtra Evac Cleaner Concentrate Weekly 5L	5722799
Butelka dozująca do EuroSept® Xtra Evac Cleaner	9796840



EuroSept® Xtra Evac Disinfection Concentrate Daily

Niskopieniący koncentrat DAILY jest koncentratem na bazie kwasu, o bardzo dobrej zgodności materiałowej. Środek czyszczący skutecznie rozpuszcza materiały nieorganiczne (brud, proszek profilaktyczny itp.). Nie zawiera aldehydu, fenolu ani chloru. Zapobiega powstawaniu osadów i niedrożności oraz rozpuszcza istniejące osady.

EuroSept® Xtra Evac Disinfection Concentrate Daily 1L	5722800
EuroSept® Xtra Evac Disinfection Concentrate Daily 5L	9883995
Butelka dozująca do EuroSept® Xtra Evac	9796840



Więcej informacji można znaleźć w instrukcji użycia produktu.

ZAMÓW ON-LINE WWW.SKLEP.MARRODENT.PL



WYSOKA JAKOŚĆ



GODNE ZAUFANIA



SZEROKI ASORTYMENT

DEZYNFEKCJA NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate



EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate



Zalety

- Ograniczone działanie wirusobójcze
- Nadaje się do stosowania w mycie ultradźwiękowej
- Nie zawiera aldehydów ani fenoli
- Niekorozyjna formuła o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej
- Forma koncentratu zwiększa ekologię w twoim gabinecie

Wskazania do użycia

Płynny koncentrat przeznaczony do ręcznej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych w procesie zanurzania, ułatwia dekontaminację narzędzi przed sterylizacją i działa w szerokim zakresie przeciwko bakteriom, drożdżom i wirusom otoczkowym.

Spektrum działania

Bakterie wg EN 13727, EN 14561 i VAH (warunki brudne)

Candida albicans wg EN 13624, EN 14562, VAH (warunki brudne)

Bakterie i Candida albicans w kąpiei ultradźwiękowej wg EN 14561 i EN 14562 (wysokie wymagania)

„Ograniczone działanie wirusobójcze” (wirusy otoczkowe, takie jak HBV, HIV, HCV) wg DVV/RKI, EN 14476 i EN 17111 (wysokie wymagania)

TB i mykobakterie (M. terrae i M. avium) wg EN 14348 i EN 14563 (czyste warunki)

Stężenie i czas ekspozycji

1,5% 15 min. 1,0% 60 min.

1,5% 15 min. 1,0% 60 min.

1,0% 5 min.

1,5% 15 min.

4,0% 30 min. 3,0% 60 min.

Skład

100 g zawiera: 4,4 g chlorku didecyldimetyloamoniowego,
2,75 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy

Koncentrat do dezynfekcji narzędzi EuroSept® Xtra

2L.....Art. nr (9884863)

5L.....Art. nr (9884864)

Zadbaj o lepszą ochronę.

**EuroSept® Xtra Instrument
Disinfection Concentrate Virucidal**



WYSOKA
JAKOŚĆ



GODNE
ZAUFANIA



SZEROKI
ASORTYMENT

EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate Virucidal



Zalety

- Wysoce skuteczna formuła o łagodnym poziomie pH i doskonałej kompatybilności materiałowej
- Nadaje się do stosowania w myjce ultradźwiękowej
- Niekorozyjna, niskopieniąca formuła
- Bez aldehydów i nadkwasów
- Forma koncentratu zwiększa ekologię w twoim gabinecie

Wskazania do użycia

Do ręcznej i końcowej dezynfekcji niekrytycznych i półkrytycznych narzędzi medycznych i chirurgicznych w procesie zanurzania. Nie nadaje się do końcowej dezynfekcji krytycznych urządzeń medycznych.

Spektrum działania

Bakterie i *Candida albicans* (EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 i VAH) (warunki brudne)

TbB (*M. terrae*) wg EN 14348, EN 14563 (warunki czyste)

„Ograniczone działanie wirusobójcze” (wirusy otoczkowe, takie jak HBV, HIV, HCV) wg RKI/DVV (warunki brudne)

Norowirusy wg EN 14476 (warunki brudne)

Adenowirusy wg EN 14476 (warunki czyste)

Polyoma SV 40 wg RKI/DVV (z warunkami)

„Wirusobójczy” (wirusy bezotoczkowe, np. adeno-, noro-, poliovirusy) wg EN 14476 (warunki czyste)

Grzyby (*A. brasiliensis*) wg EN 13624, EN 14562 (warunki czyste)

Zarodniki (*C. difficile*) wg EN 13704 (warunki czyste)

Stężenie i czas ekspozycji

2,0 % 15 min. 1.0 % 60 min.

2,0 % 15 min. 1.0 % 60 min.

2,0 % 15 min. 1.0 % 60 min.

3,0 % 15 min.

1,5 % 60 min. 3,0 % 15 min.

3,0 % 15 min.

3,0 % 30 min.

3,0 % 60 min.

3,0 % 60 min.

Skład

100 g zawiera: 8,0 g chlorku didecyldimetyloamoniowego; 5,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylo-propano-1,3-diaminy

**Wirusobójczy koncentrat do
dezynfekcji instrumentów EuroSept® Xtra**

5L..... Art. nr. (9884868)

Nieźrównana moc czyszczenia enzymatycznego.

**EuroSept® Xtra Instrument
Enzymatic Cleaner Concentrate**



WYSOKA
JAKOŚĆ



GODNE
ZAUFANIA



SZEROKI
ASORTYMENT

EuroSept® Xtra Instrument Enzymatic Cleaner Concentrate

Zalety

- Do aktywnego czyszczenia narzędzi medycznych przed dezynfekcją
- Nadaje się do stosowania w myjce ultradźwiękowej
- Niskopieniąca, niekorozyjna formuła o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej
- Praktyczne butelki dozujące
- Forma koncentratu zwiększa ekologię w twoim gabinecie



Wskazania do użycia

Środek ten służy do czyszczenia narzędzi z białka (krwi lub śliny) przed dezynfekcją.

Sposób użycia

Aby przygotować 1L roztworu, wymieszaj 980 ml wody (maks. 40°C) z 20 ml środka czyszczącego. Silnie zanieczyszczone narzędzia należy najpierw oczyścić mechanicznie. Narzędzia te należy umieścić w gotowym roztworze. Wszystkie czyszczone powierzchnie i wgłębienia muszą być całkowicie zanurzone w roztworze. Jeśli roztwór jest mętny lub widać w nim cząsteczki, należy go zmienić. Zaleca się wymianę roztworu przynajmniej raz dziennie. Po umyciu dokładnie opłukaj narzędzia, najlepiej wodą demineralizowaną, wysusz i przetrzyj środkami dezynfekcyjnymi. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta narzędzi dotyczącymi dekontaminacji. Roztwór czyszczący można także stosować w myjce ultradźwiękowej. Nie mieszać z detergentami ani środkami dezynfekującymi. Po zakończonym czyszczeniu produkt można wylać do kanalizacji. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Stosowane stężenie	0,5–1% przy normalnym zanieczyszczeniu, do 5% przy ciężkich zanieczyszczeniach
Czas ekspozycji	5–30 min. w zależności od stopnia zabrudzenia
Zawiera	< 5–15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, enzymów, substancji zapachowych

Koncentrat enzymatycznego środka czyszczącego EuroSept® Xtra do przyrządów

1L.....Art. nr (9884858)

5L.....Art. nr (9884236)

Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji wiertel.

EuroSept® Xtra Bur Disinfection



EuroSept® Xtra Bur Disinfection



Zalety

- Gotowy do użycia, nie trzeba rozcieńczać
- Szerokie spektrum działania
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Nadaje się do stosowania w myjce ultradźwiękowej
- Uniwersalne zastosowania
- Przyjemny świeży zapach



Wskazania do użycia

Do łatwego przygotowania wiertel i przyrządów obrotowych przed sterylizacją.

Dane fizyczne

Spektrum działania

Bakterie (w tym MRSA) zgodnie z EN 13727, EN 14561, VAH (wysokie wymagania)

Drożdże (Candida albicans) wg EN 13624, EN 14562, VAH (wysokie wymagania)

„Ograniczone działanie wirusobójcze” (wirusy otoczkowe, takie jak HBV, HIV, HCV) DVV/RKI i EN 17111 (wysokie wymagania)

Mykobakterie (M. terrae i M. avium) EN 14348, EN 14563 (warunki czyste)

Czas ekspozycji

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

Skład

100 g zawiera: 0,396 g chlorku didecyldimetyloamoniowego, 0,2475 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylo-propan-1,3-diaminy

EuroSept Xtra Bur Disinfection

2L.....Art. nr (9884830)

5L.....Art. nr. (9884831)

Szybkie działanie wirusobójcze na delikatnych powierzchniach.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection
Virucidal Alcohol Free**



WYSOKA
JAKOŚĆ



GODNE
ZAUFANIA



SZEROKI
ASORTYMENT

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Virucidal Alcohol Free



Zalety

- Produkt odpowiedni do stosowania na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (szkło, plastik, skay i pleksjiglass)
- Szerokie spektrum działania
- Szybko działająca, gotowa do użycia formuła
- Zabija wszystkie wirusy
- Odpowiedni do dezynfekcji końcowej, jeśli nie jest możliwa sterylizacja termiczna

Spektrum działania

Bakterie zgodnie z normami 13727 i EN 13697 (warunki brudne)

Candida albicans zgodnie z normami EN 13624 i EN 13697 (warunki brudne)

Gruźlica zgodnie z normą EN 14348 (M. terrae) (warunki czyste)

Działanie wirusobójcze zgodnie z normą EN 14476 (warunki czyste)

Zarodniki (C. difficile) zgodnie z normą EN 13704 (warunki czyste)

Czas ekspozycji*

1 min.

1 min.

5 min.

2 min.

60 min.

Skład

Zawartość w 100 g: 0,48 g Didecyldimethylammoniumchloride, 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propane 1,3-diamine

*Nie wycierać do sucha przed upływem czasu aplikacji.

**EuroSept® Xtra Surface Disinfection
Virucidal Alcohol Free**

1 L ze spryskiwaczem.....Nr artykułu (9884889)

5L.....Nr artykułu (9884891)

Łagodny dla skóry
balsam do mycia rąk.

EuroSept® Xtra Wash Lotion



WYSOKA
JAKOŚĆ



GODNE
ZAUFANIA



SZEROKI
ASORTYMENT

EuroSept® Xtra Wash Lotion



Zalety

- Wysoce skuteczny koncentrat czyszczący
- Nie zawiera parabenów, mydła i substancji alkalicznych
- Wartość pH przyjazna dla skóry
- Delikatna formuła nawilżająca, która zapobiega wysuszaniu i podrażnianiu skóry, nawet przy częstym myciu rąk
- Przetestowany dermatologicznie

Instrukcja użytkowania

Wlać koncentrat z pojemnika do butelki z dozownikiem. Dozować około 2–3 pompki na cykl mycia. Nanieść na wilgotne dłonie, równomiernie rozprowadzić, a następnie spłukać wodą.

Kolor	Niebieski
pH	6,5
Gęstość	1,02 g/ml
Okres przydatności do użycia po otwarciu	12 miesięcy
Okres przydatności do użycia	36 miesięcy
Skład	Woda, laurylosiarczan sodu, betaina kokoamidopropylowa, glutaminian sodu lauroyl, kokamid dea, chlorek sodu, perfum, metyloizotiazolinon, alkohol benzylowy, salicylan benzylu, CI 61585

EuroSept® Xtra Wash Lotion

Przyjemny, świeży zapach

500ml.....Art. nr (9884920)

1L.....Art. nr (9884921)

5L.....Art. nr (9884923)

EuroSept® Xtra Wash Lotion Sensitive

Nie zawiera substancji zapachowych i barwników.

500ml.....Art. nr (9884925)

1L.....Art. nr (9884926)

5L.....Art. nr (9884928)

Produkt uzupełniający:
Pompka dozująca



Dla 500ml.....Art. nr (9792558)

Dla 1L.....Art. nr (9792558)

Dla 5L.....Art. nr (9792557)